


# 《 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% R14mm綿棒セット「ハクゾウ」 14mm-1本 》 操作手順①



ハクゾウメディカル株式会社

## STEP 1

液面が下になるように傾けてください。

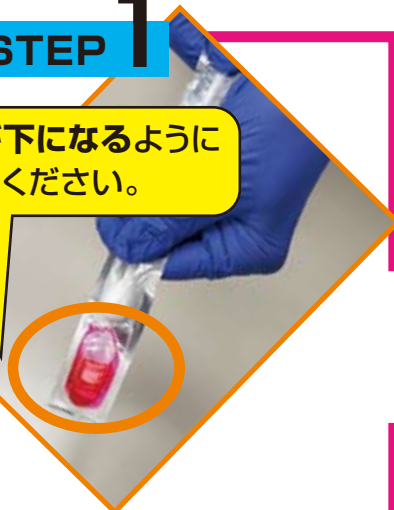

綿棒が見える面を上を持つ。

## STEP 2



薬液を↓の方向に向ける。綿棒を押し込み、含浸させる。

※本製品は未滅菌となります。

## STEP 3



液の逆部分から←→の方向に引っ張っていき、フィルムを開封します。

## STEP 4



綿棒を↑の方向に引っ張り、取り出します。



STEP 5



綿棒が含浸した綿棒を  
持ちます。

STEP 6



皮膚上に塗布します。

色の落とし方(穿刺部の周囲のみ)



エタノール含浸綿での着色落としが可能です。  
(穿刺部の周囲等、不要な部分のみを色落としてください)

⚠️ ご使用上の注意




薬液部分を押しさないで  
ください。



薬液部分を上にして、  
押しさないでください。

塗布範囲(参考)

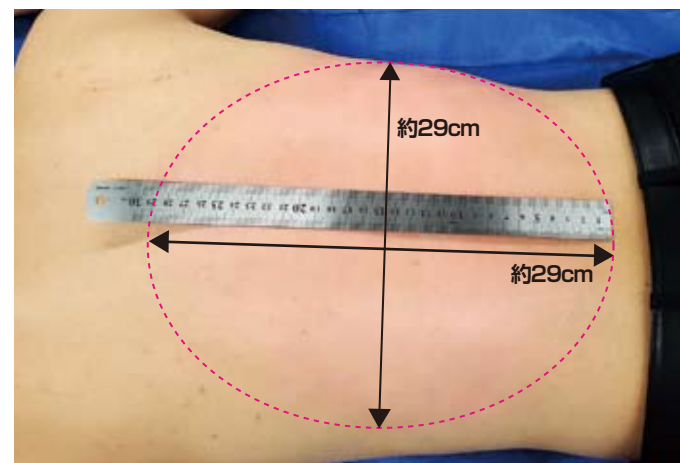

皮膚(背中)に塗布した場合の目安  
(直径:約29cm 面積:約660cm<sup>2</sup>)