

一般医療機器

日本製



Design Your Voice

Hakuzo

【一般医療機器】洗浄剤注入用具
届出番号27B2X00243000166
販売名:創洗浄用粘着フィルム

SURG POCKET[®]
サージポケット[®]
創洗浄用粘着フィルム

滅菌済

単回使用

新発売

閉創時の洗浄を
効率化



※写真は使用時のイメージです。



本製品は大阪大学次世代内視鏡治療学講座(中島清一先生)および同消化器外科学講座(野田剛広先生)との共同開発品となります。



ハクゾウメディカル株式会社

SURG POCKET®

サージポケット

創洗浄用粘着フィルム

形状・寸法

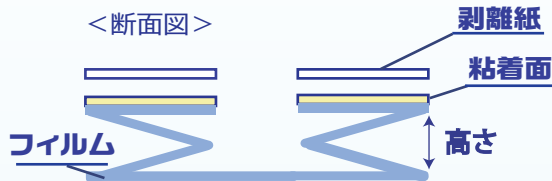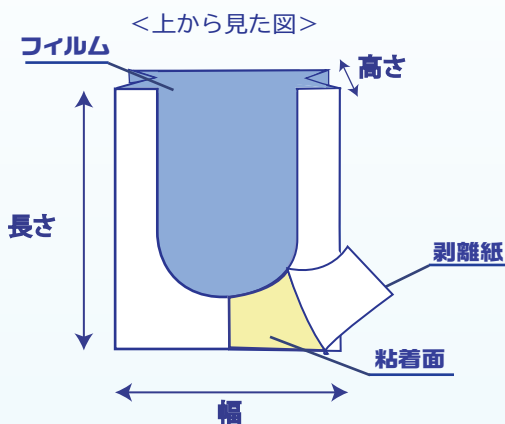


項目	寸法
幅	150±5mm
長さ	260±5mm
高さ	30±5mm


項目	素材
フィルム	ナイロン/ポリエチレン
粘着面	アクリル系粘着剤(低刺激性)

※【高さ】の寸法は、フィルムの折り畳みを伸ばした際の最長の数値である。


使用方法

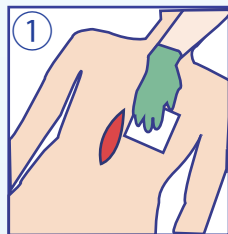


使用前に貼付け部位をガーゼ等で拭き取り、水分を除去する。

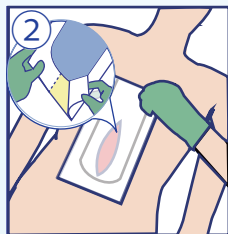


剥離紙をはがし、創辺縁部にフィルムを貼付する。

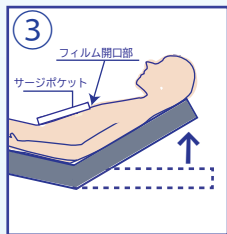

フィルム開口部が高くなるようにギャッジアップをする。

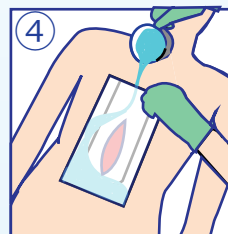


皮膚とフィルムの上に生理食塩水等の洗浄液を注ぎ入れる。(最大500mLまで)

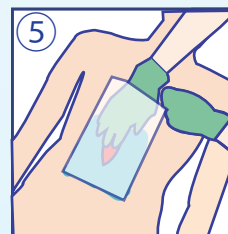

手指等を用いて創部の洗浄を行う。



洗浄後フィルム内の洗浄液を吸引嘴等で吸引する。

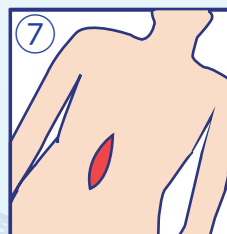

すまやかにフィルムをはがし、適切に廃棄した後ガーゼ等で皮膚に残った水分を拭き取る。



使用方法説明動画

使用上の注意

1. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
2. 包装開封後、速やかに使用すること。
3. 包装に破損、汚染が見られる場合は使用しないこと。
4. 粘着面が創部に接しないように貼付すること。
5. 本品の使用によりかぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
6. 高齢の患者などで皮膚が脆弱な場合、粘着剤使用製品の貼付時・剥離時には、特段の配慮が必要である。特に皮膚に緊張をかけないようにすること。皮膚がひっぱられて炎症を起こすことがある。
7. 粘着テープをはがす際には、ゆっくりはがすこと。また、はがす際には押さえている手をこまめに粘着境界部に移動し、皮膚に緊張をかけないように配慮すること。
8. 高温を発する機器類に接しないように注意すること。

品番	規格	包装	1 梱入数	JANコード	GS1 コード
3155100	150mm×260mm 1枚滅菌	10袋	10箱	4 958286 719863	(01)04958286719863



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320