

器 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄剤注入用具 JMDN コード 70463000

創洗浄用粘着フィルム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は粘着面付きのフィルムをエチレンオキサイド滅菌している。

フィルム : ナイロン/ポリエチレン

粘着テープ: アクリル系粘着剤

剥離紙 : 紙、ポリエチレン、シリコーン

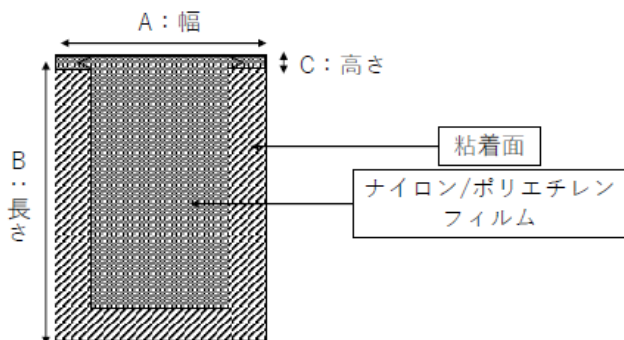

項目	寸法
A : 幅	50~300mm
B : 長さ	50~300mm
C : 高さ	10~100mm

※寸法はそれぞれ記載された範囲の組み合わせにより複数のサイズバリエーションを有する。



※「C : 高さ」の寸法は、フィルムの折り畳みを伸ばした際の最長の数値である。

【使用目的又は効果】

創部洗浄の補助具として用いる。

【使用方法等】

本品の使用前に、皮膚と粘着面の接する部位をガーゼなどで拭き取るなどして水分を除去する。創部を洗浄する際に剥離紙をはがして創部辺縁部にフィルムを貼付する。皮膚とフィルムの空間に生理食塩水等の洗浄剤を充填し、洗浄剤を皮膚とフィルムの空間内に貯めたまま、手指等を用いて創縁を擦って創部の洗浄を行う。

洗浄後は、フィルム内の洗浄剤を吸引嘴管やガーゼなどで吸引回収し、すみやかにフィルムをはがし、適切に廃棄すること。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
2. 包装開封後、速やかに使用すること。
3. 粘着面が創部に接しないように貼付すること。
4. 本品の使用によりかぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
5. 高齢の患者などで皮膚が脆弱な場合、粘着剤使用製品の貼付時・剥離時には、特段の配慮が必要である。特に皮膚に緊張をかけないようにすること。皮膚がひっぱられて炎症を起こすことがある。
6. 粘着テープをはがす際には、ゆっくりはがすこと。また、はがす際には押さえている手をこまめに粘着境界部に移動し、皮膚に緊張をかけないように配慮すること。
7. 高温を発する機器類に接しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載。

[自己認証（自社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)