


マスクのノーズフィットによる 顔などへの傷害にご注意

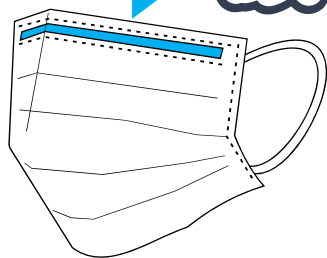


- 不織布マスクをできるだけ顔に隙間なく密着させるため、鼻付近に当たる部分にノーズフィットが入っているものがあります
- ノーズフィットの材質には樹脂製のもの、金属製のワイヤーを樹脂で覆ったもの、金属製のものがあります

相談事例


- 小学生の子どもが不織布マスクを着用したところ、ノーズフィットの端がチクチクした。痛みを我慢して着用していたが、下校してから外したところ目の下に傷があり、少し出血していた
- マスクを捨てる際に丸めたところ、鼻部分の針金が出てけがをすところだった
- マスクから出ていたワイヤーが眼に入った

商品テスト

- ノーズフィットの端部を調べたところ、樹脂製、金属製のノーズフィットの端部は尖っており、金属製のワイヤーを樹脂で覆ったものでは端部からワイヤーが露出しているものがありました

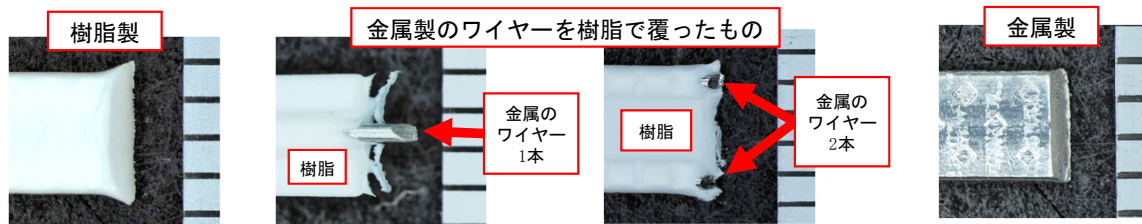

- マスクを縦に半分に折りたたむ操作を繰り返したところ、ノーズフィットの端部が不織布を貫通したり、不織布が剥がれてノーズフィットが露出するものがありました

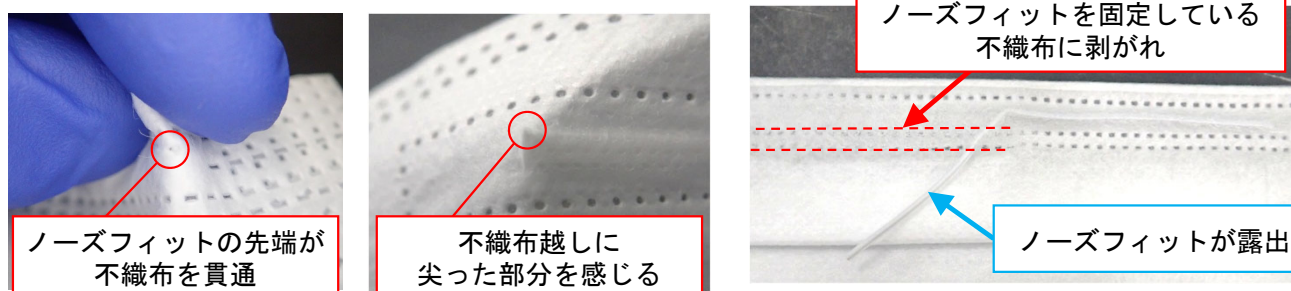

⚠ 消費者へのアドバイス

- ① 不織布マスクのノーズフィットの材質や形状、マスクの構造によっては、ノーズフィットの端部により皮膚や眼を傷つけることがあります。マスクを着用する際や着用中に調整する際には、ノーズフィットの端部をよく確認しましょう。
- ② マスクを着け外しする際や廃棄するときなど、ノーズフィットを折り曲げるときには、ノーズフィットの端部が不織布を貫通したり、鋭く尖った部分が突き出し、それに触れやすくなりますので、取扱いには注意しましょう。

