



口腔ケア製品カタログ

ORAL CARE CATALOG



ハクゾウメディカル株式会社



ここ笑み®

HAKUZO NURSING CARE

これからも、ずっと笑顔。

介護ブランド「ここ笑み」は、

介護する人はもちろん、

される人にも同じように使いやすく、

快適に感じてもらえるような製品を開発してまいりました。

介護の時間を少しでもここちよいものにし、

関わる人すべてが笑顔となれる時間をつくりたい。

それが「ここ笑み」の願いです。




ここ笑み(ここえみ)は心と身体へのやさしさを考えた介護製品ブランドです。

口腔ケアとは？

「**口腔ケア**」とは、口腔内をきれいにしたり、

口腔機能（食べる・話す・笑う・呼吸するなど）を保つためのケアのことです。

生活全般に関わり、人とのコミュニケーションを広げ、いきいきとした生活を送るために大切です。

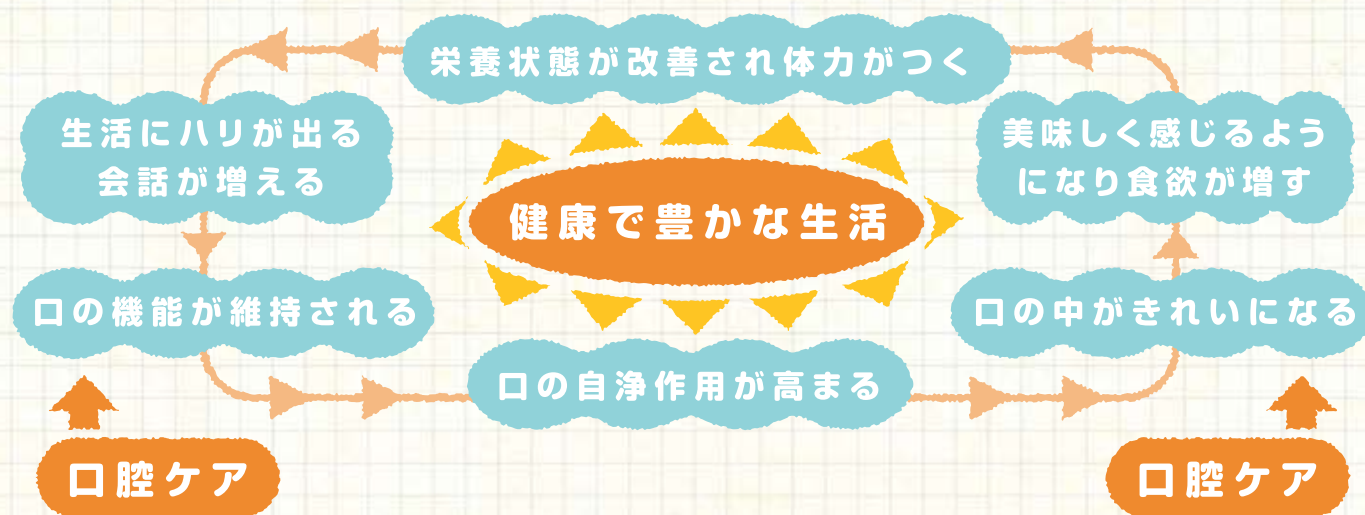

口腔ケアの流れ 口腔ケアは毎日が基本です。

介護の口腔ケア

高齢者が元気で過ごすために、口腔内をキレイに保つことは重要です！

口腔内の汚れにより、肺炎の一種である「**誤嚥性肺炎**」をまねくリスクが高まります。

口腔内をキレイにすることは、誤嚥性肺炎の予防にもなります。

日常的な口腔ケアの方法に関する動画はこちら



① 口の中の観察

まず、口の中の状態を把握します。

② 保湿ケア

保湿ケアが必要な方：口の中が乾燥している/乾燥した汚れがこびりついている

口の中が乾燥した状態でケアを始めると、粘膜を傷つけてしまうので、ケア前に保湿しましょう。(P3、P7 参照)

③ お口みがき(粘膜のケア)

お口みがきが必要な方：粘膜(舌や上あごなど)が汚れている/食べかすなどが口の中に残っている

食べかす・舌の汚れ・痰などを取り除きます。(P4、P5、P6、P7、P8、P9 参照)

④ 歯みがき

歯みがきが必要な方：歯がある

口腔ケアの基本です。(P6 参照)

⑤ 保湿ケア

保湿ケアが必要な方：口の中が乾燥しやすい

口の中が乾燥しやすい方は、口腔ケアの仕上げに保湿しましょう。(P3、P7 参照)

その他 入れ歯の清掃：入れ歯がある場合は、清掃します。

終了

爽快 お口うるるジェル

お口の汚れを軟化させ絡め取る口腔ケア用ジェルです。

保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。

製品特長

- 汚れをすばやく軟化させて絡め取る。
- 粘性が高く垂れにくい。
- 流動性が良いため塗り広げやすい。
- 保湿成分ヒアルロン酸Naを配合し、しっかり保湿。
- リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能。
- 刺激が少ないパラベンフリー処方。



成分

水、グリセリン、PG、キシリトール、サッカリンNa、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントール、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、ポリリン酸Na、安息香酸Na、香料

使用方法

ジェルをグローブやお皿などに適量取り、まんべんなく伸ばしながらスポンジブラシ、歯ブラシ等につけます。歯および口腔内を清掃した後に、吐き出するか、拭き取ってください。口腔内のマッサージや乾燥汚れの清掃にもご使用いただけます。



はちみつレモン風味

はちみつの甘さと
さわやかなレモンの風味



パインアップル風味

パインとグリーンアップルの
さわやかな風味



使用動画はこちら



楽しみながらケアを受けていただけるように、リアルな風味を再現しています

化粧品

爽快 お口すっきりウェットシート

口腔内の清潔と口臭予防に使える口腔ケア用ウェットシートです。

デコボコシートがお口の汚れをしっかりキャッチします。


製品特長

- デコボコ構造がお口の汚れをしっかり拭き取る。
- コットン100%のやわらかい素材を使用。
- 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくい。
- お口の汚れを軟化して除去する。
- 保湿成分トレハロースを配合し、しっかり保湿。
- 刺激が少ないアルコールフリー処方。
- 爽やかなミント風味で口腔内をリフレッシュ。
- 外食時の歯みがき代わりにも。

緑 色：繊維の積層

ピンク 色：ガーゼ綿糸

イメージ図

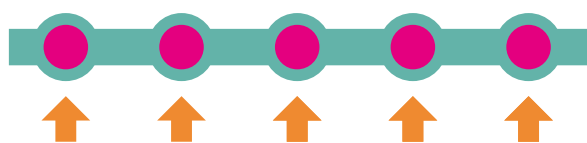

ガーゼ綿糸のデコボコが
汚れを拭き取る

使用方法

シートを指に巻いたり、折りたたんだりして口腔内の汚れを拭き取ります。
歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。舌の汚れの清拭・清浄
にもご使用できます。



使用動画はこちら



ミント風味

すっきり爽やかな
ミントの風味



拡大写真

ガーゼと不織布を掛け合わせた
「ハイブリッド不織布」を使用

成分

水、PG、DPG、PEG-60水添ヒマシ油、グリセリン、トレハロース、キシリトール、メントール、クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、スクラロース、香料

品 番	規 格	包 装	1 梱 入 数
1156993	150mm×200mm ミント風味	50枚/個	40個

爽快 お口すっきりドライシート

口腔内の清掃や舌のお手入れに使える口腔ケア用ドライシートです。

デコボコシートがお口の汚れをしっかりキャッチします。

製品特長


- デコボコ構造がお口の汚れをしっかりと拭き取る。
- コットン100%のやわらかい素材を使用。
- 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくい。
- 舌のお手入れにも使用しやすいサイズ。



緑 色：繊維の積層

ピンク 色：ガーゼ綿糸

イメージ図

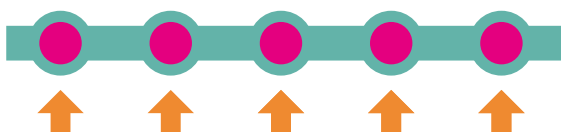

ガーゼ綿糸のデコボコが
汚れを拭き取る

品 番	規 格	包 装	1梱入数
1156994	80mm×220mm 2折	150枚/箱	40箱

使用方法

化粧箱からシートを1枚ずつ取り出し、口腔内の汚れを拭き取ります。

シートを指に巻いたり、折りたたんだりしてご使用ください。

歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。

舌の汚れの清拭・清浄にもご使用できます。

使用動画はこちら



ミシン目を切り取り、
背面からも
取り出し可能です。



拡大写真

ガーゼと不織布を掛け合わせた
「ハイブリッド不織布」を使用

爽快 お口キレイぐるっとブラシ

360度設計のため角度を選ばず磨きやすい、介助者にとって使いやすい形状です。

毛細管現象で汚れを吸い上げ、除去しやすい!!

製品特長

○標準的な歯ブラシのように、擦って取るのではなく、20倍以上の毛数による

毛細管現象^{*}で毛束の中に汚れを吸着することができます。

※ 毛細管現象


細い管の間を液の表面張力の作用により、吸い上げる現象のことです。
毛束が多いほど、より吸い上げます。

○やわらかい極細毛を使用。

○毛先が丸く、粘膜や歯茎にやさしい。

○舌ブラシとしても兼用できます。

使用動画はこちら

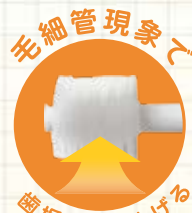

360°設計



品 番	規 格	包 装	1梱入数
3162360	ブラシ径 15mm ホワイト	10本/箱	50箱

柄の材質	ポリプロピレン	毛の硬さ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	90℃

磨き方

回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、縦磨き・横磨きで磨いてください。1本ずつ磨くイメージです。

前 歯



ふつうの歯ブラシと同じように、横磨きか、縦磨きで磨きます。歯並びが良くない方には縦磨きをおすすめします。

前歯の裏側



毛先がきっちり当たりにくいのが前歯の裏側です。円筒ヘッドで大量の極細毛があるため、汚れている部分にぴったりフィットします。

犬 歯



凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨きで磨きます。裏側の傾斜部分も、一気に磨き上げることが可能です。

前歯裏側の上下同時磨き



円筒ヘッドなので、上下同時に磨くことも可能です。回転させずに横磨きで磨いてください。

奥 歯



内側側面は、ハンドルを斜めに立てて、斜め方向に小刻みに動かして磨きます。

奥歯の上下同時磨き



軽く噛むようにしてトップを磨きます。奥は開き気味に、手前は閉じ気味といったように、あごの角度を徐々に変えていくのがポイントです。

歯茎ブラッシング



肌をパッティングするのと同様に、歯茎も軽くブラッシングすることをおすすめします。

舌クリーニング




軽く舌を突き出し、ブラシを舌にのせ、力を入れ過ぎないようにして手前に引き出します。

爽快スポンジ レギュラータイプ

歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した製品です。

製品特長

- 切り込みが6箇所あるスポンジ形状なので、細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすい。
- きめ細かいスポンジを使用していますので、口腔内のあたりが柔らかい。
- 50本入スタンドパウチで持ち運びに便利。
- 在宅介護向けに適した10本入タイプ(プラスチック軸のみ)もございます。

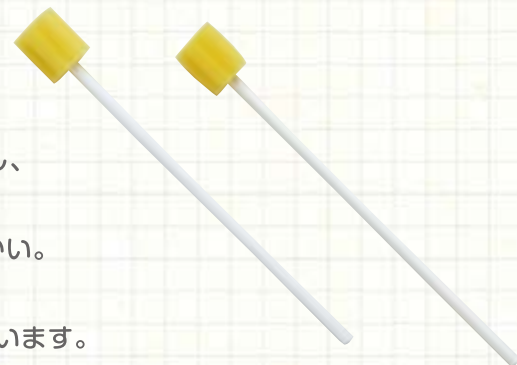

プラスチック軸




耐水性があるため、水や液剤を浸して使用しやすくなっています。軸を噛む方、唾液の多い方に適しています。

紙軸



操作性が良いため、固まった汚れのある方に適しています。海洋プラスチックごみ問題からプラスチックの削減に寄与します。

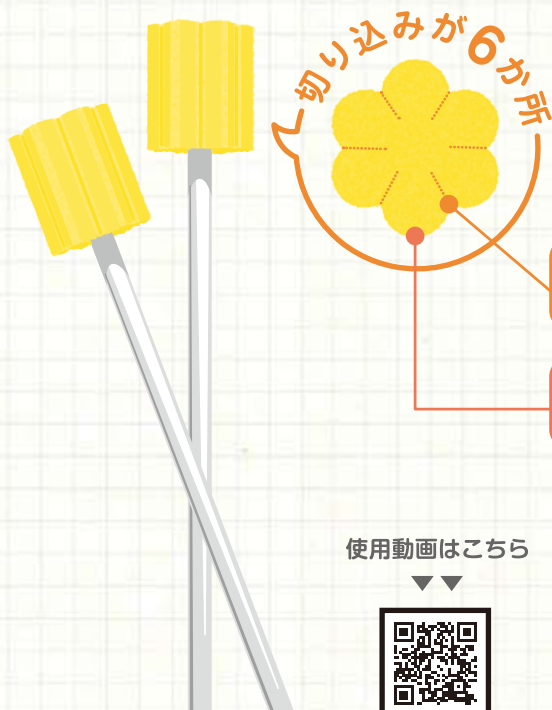

6つの切り込みで 細部の汚れまでキャッチ

凹部分に切り込みがあるため、

- ① 回転させることでスポンジが細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすくなっています。
- ② きめ細かいスポンジを使用しており、口腔内のあたりが柔らかくなっています。

品番	規格	包装	1梱入数
1240973	レギュラー 紙軸	50本×6袋/箱	6箱
1240976	レギュラー プラスチック軸	50本×6袋/箱	6箱
3118060	レギュラー プラスチック軸 10本入	10本×20袋/箱	6箱



紙軸 50本入



プラスチック軸 50本入




プラスチック軸 10本入

爽快綿棒ハーフ

片側巻綿タイプで、巻綿部は広範囲のケアをし易いドラム型です。

製品特長

- 太くて丈夫な紙軸を使用しています。
- 頬粘膜のような広範囲のケアをしやすくする為ドラム型にしました。

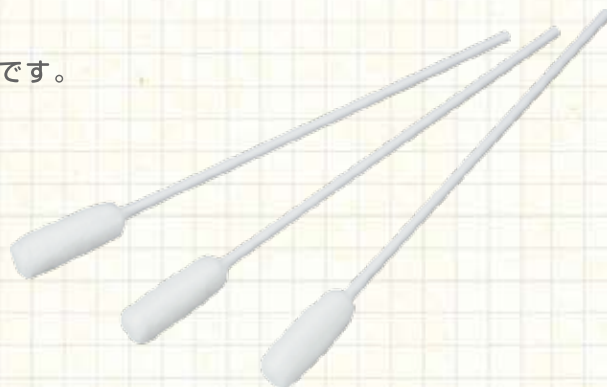

品 番	規 格	包 装	1 梱 入 数
1240012	紙軸片軸	200本/箱	20箱

爽快綿棒サンクスワブ

口腔内の清掃、マッサージに好適な凹凸タイプの口腔清拭用綿棒です。



製品特長

- 5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去（拭き取り）に最適です。
- しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
- 硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
- 保湿ジェルの塗布にご使用できます。
- 適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージ用としてもご使用できます。



デコボコ綿体が汚れをキャッチ

品 番	規 格	包 装	1 梱 入 数
3300039	凹凸タイプ綿棒 紙軸	1本/袋×50本/箱	20箱

化粧品

爽快 ハクゾウマウスクリーンA

液剤を含浸させた器質的・機能的口腔ケア用の綿棒です。

製品特長

- 液剤を含浸しているので、開封後即ご使用できます。
- 香料入りで清涼感が得られます。
- 綿棒を凍らせてアイスマッサージ用としてもご使用できます。



4つのポイント

その1

○準備不要

水やコップなどは不要です。
水場のない場所でも気軽に使用できます。
(ベッドサイド、訪問看護など)

その2

○誤嚥のリスクが少ない

綿棒からは液剤が少しずつ染み出るため、誤嚥の危険性が少ないです。
歯ブラシ・スポンジの場合、しぼって水分をきった後、更にティッシュなどで水分を除去する必要があります。

その3

○味付き

液剤に味があるため、楽しみながら口腔ケアができます。
楽しさが口腔ケアの継続につながります。
味覚を刺激する訓練にもなります。
味を楽しむことが食べることに對する意欲の向上につながります。

その4

○アイスマッサージが簡単

個包装のため、冷蔵庫で凍らせておくすぐにご使用できます。
製氷機の細菌による汚染を気にせず、清潔な口腔ケアが可能です。
嚥下反射を誘発させるアイスマッサージは、繰り返し行うことが重要です。

品 番	規 格	包 装	1梱入数
1290092	No.12 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱
1290093	No.13 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱
1290095	No.12 ブルーベリー風味	1本×25袋/箱	40箱

成 分


水、グリセリン、ソルビトール、
安息香酸Na、ベンザルコニウムクロリド、
ハッカ油、香料

使用動画はこちら



使用手順

- ① 袋を開封して綿棒を取り出します。
- ② 綿棒を口の中に入れて清拭します。

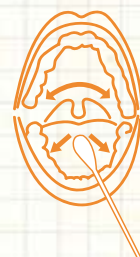

● 口腔ケアに関連する診療報酬（内容抜粋）2021.9 現在の内容

リハビリテーション	点 数
H004 摂食機能療法（1日につき）	
1.30分以上の場合 （摂食機能障害を有する患者に対して、月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定可能。）	185点
2.30分未満の場合 （脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。）	130点
当該保健医療機関の保険医、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合に、 摂食嚥下支援加算 として、週1回限り 200点 を所定点数に加算。	

歯科診療	点 数
B000・8 周術期等口腔機能管理科(Ⅲ)	
がん等に係る放射線治療若しくは化学療法を実施している患者（予定している患者を含む）又は緩和ケアの対象となる患者であって、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行った場合に算定する。	200点
I030・2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(口腔につき)	
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、 <u>口腔清掃用具等を用いて</u> 口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合、月2回に限り算定。経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものが対象。	100点

● 口腔ケアに関連する介護報酬で、2021年度改定により変更になった部分

現 行	改 定 後
施設系サービス	
口腔衛生管理体制加算 30単位/月	廃止
口腔衛生管理加算 90単位/月	口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
栄養マネジメント加算 14単位/日	口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位/月 (新設)
低栄養リスク改善加算 300単位/月	廃止
	栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日減算(※3年の経過措置期間を設ける)
	栄養マネジメント強化加算 11単位/日 (新設)
	廃止
通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス	
栄養スクリーニング加算 5 単位/回 (※6月に1回算定可)	口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回 (新設)
口腔機能向上加算 150単位/回	口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回 (新設)
	口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
	口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(※原則3月以内、月2回を限度) (新設)
通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護	
栄養改善加算 150単位/回 (※1月に2回を限度)	栄養アセスメント加算 50単位/月 (新設)
	栄養改善加算 200単位/回 (※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える)
認知症グループホーム 栄養管理体制加算 30単位/月 (新設)	
施設系サービス(介護療養型医療施設を除く)、通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス	
< 施設系サービス > 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位/月 (新設) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位/月 (新設) (※加算(Ⅱ)について、服薬情報の提供を求めない特養・地密特養については、50単位/月) < 通所系・多機能系・居住系サービス > 科学的介護推進体制加算 40単位/月 (新設)	

口腔ケア製品一覧

品 名	品 番	規 格	包 装	1梱入数	JANコード
爽快 お口うるるジェル	3901180	はちみつレモン風味 80g	1本/箱	60箱	4 958286 718095
爽快 お口うるるジェル	3901181	パインアップル風味 80g	1本/箱	60箱	4 958286 718101
爽快 お口すっきりウエットシート	1156993	150mm×200mm ミント風味	50枚/個	40個	4 958286 079967
爽快 お口すっきりドライシート	1156994	80mm×220mm 2折	150枚/箱	40箱	4 958286 718194
爽快 お口キレイぐるとブラシ	3162360	ブラシ径15mm ホワイト	10本/箱	50箱	4 958286 718187
爽快スポンジ	1240973	レギュラー 紙軸	50本×6袋/箱	6箱	4 958286 717920
爽快スポンジ	1240976	レギュラー プラスチック軸	50本×6袋/箱	6箱	4 958286 717937
爽快スポンジ	3118060	レギュラー プラスチック軸 10本入	10本×20袋/箱	6箱	4 958286 718637
爽快綿棒ハーフ	1240012	紙軸片軸	200本/箱	20箱	4 958286 303154
爽快綿棒サンクスワブ	3300039	凹凸タイプ綿棒 紙軸	1本/袋×50本/箱	20箱	4 958286 711843
爽快 ハクゾウマウスクリンA	1290092	No.12 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱	4 958286 053080
爽快 ハクゾウマウスクリンA	1290093	No.13 レモン風味	1本×25袋/箱	40箱	4 958286 054001
爽快 ハクゾウマウスクリンA	1290095	No.12 ブルーベリー風味	1本×25袋/箱	40箱	4 958286 058337

お客様相談窓口 **0120-50-0451**
フリーダイヤル

ここ笑み専用サイト
<https://www.hakuzo.co.jp/cocoemi/>

ホームページ



LINE



Instagram



Twitter



Facebook

