

# プレートNEO

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

### 【形状・構造及び原理等】

脱脂綿を球状に加工したものである。X線で検知できる糸を取り付けている。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・ポリプロピレン（固定材） ・ウルトラマリン（着色剤）

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

### 【使用方法等】

- \*使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- 体内に留置しないこと。
  - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
\*<http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)