

ハクゾウサージカルドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

クレープ紙又は不織布にポリエチレンフィルムをラミネート加工したものである。適度なバリア性を有しており、水、血液、体液を通過しない。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
2. 包装容器より本品を取り出す。
3. 術野を覆う又はカテーテル処置部を覆ったり、敷物として使用する。

【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
 1. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 2. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・ 製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

* <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)