

ハクゾウアイスポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

*セルロースで構成されたスポンジで、液体等の
吸収力に優れている。本品は酸化エチレンガス
(EOG) による滅菌を行っている。

*



* 全長：16mm±1.6mm

【使用目的又は効果】

眼科等の処置時に体液・排出液及び薬液等を吸収・除去
するために用いる。
視認性の確保・向上に繋がる。

【使用方法等】

本品をピンセット等で把持し、適用箇所に合わせて吸収する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 吸水部を切断する等の行為は絶対にしないこと。
- 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 包装開封後、すぐに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、
清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

- *本品の容器若しくは被包に記載
- *[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)