

医 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

## ハクゾウ滅菌メジャーゼ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。[切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがある。]
- 電気メス等を近付けないこと。[引火するおそれがある。]

#### 【形状・構造及び原理等】

ガーゼとX線造影材の組み合わせからなり、縫製や表面加工によって一体化したもので、それに紐を取り付けているものもある。  
エチレンオキサイドガスによる滅菌を行っている。

X線造影材	硫酸バリウム（造影剤） スチレン系エラストマー（固定材） TET 5MA636 GRN（着色剤）
表面加工剤	綿

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
  - 体内に留置しないこと。
  - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 包装開封後、速やかに使用すること。
  - 取り付けている紐は、身体内部から出して使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
<https://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)