

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 止血用押圧器具 JMDN コード 70617000

ハクゾウ A L G パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエチレンからなるメッシュシート、アルギン酸カルシウムからなる不織布、ポリエチレンからなる防漏シートの 3 種類の基材を貼り合せた 3 層構造のパッドで、酸化エチレングス（EOG）による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕（橈骨動脈）部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具である。

【使用方法等】

製品を無菌的に取り出し、止血部分にメッシュシート（白色）側をあて、圧迫止血できる程度におさえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
 - 1) 包装開封後、速やかに使用すること。
 - 2) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
<https://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)