

医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

エレバンワイドDX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド : 脱脂綿、ポリエチレン
粘着テープ : ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

滅菌済医療機器

- ・ No. 50 (50mm×80mm) 50枚入
- ・ No. 60 (60mm×100mm) 50枚入
- ・ No. 80 (80mm×130mm) 30枚入
- ・ No. 100 (100mm×160mm) 30枚入
- ・ No. 110 (110mm×200mm) 20枚入
- ・ No. 120 (120mm×260mm) 20枚入

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
- 2) 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1~2回粘着面の位置をかえること。
- 3) パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
- 4) 粘着面を患部に貼らないこと。
- 5) 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 6) 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- 7) 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

* 2. 有効期間

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

リバテープ製薬株式会社
熊本県熊本市北区植木町岩野45
TEL 0120-199-189

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

* <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)