

医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

エレバンフィルムS10

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ : ポリウレタン、アクリル系粘着剤

滅菌済医療機器

- ・ No. 50 (50mm×70mm) 100枚入
- ・ No. 60 (60mm×90mm) 50枚入
- ・ No. 80 (80mm×120mm) 50枚入
- ・ No. 100 (100mm×150mm) 50枚入

【使用目的又は効果】

創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護

【使用方法等】

貼付部位及び処置方法に合ったサイズのドレッシングを選択してください。

- 裏面の大きい剥離紙①を剥がしてください。
- 残りの小さい剥離紙②と粘着面のないフィルム端を両手で持ち、貼付部位の中心がドレッシングの中心にくるように貼付してください。貼付後、小さい剥離紙②を剥がしてください。
- フィルムの縁を念入りに押さえ確実に貼付し、表面の透明な剥離用テープ③をつまみ、矢印の方向にゆっくりと剥がしてください。
- 残りの補助フィルムは、色付テープの端をつまみ、テープのシワや浮きがないようにゆっくりと剥がしてください。
使用后、本品を剥がす場合は、まわりの皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくり剥がしてください。剥がれにくい場合、及び粘着剤の残渣がみられる場合は医療用剥離剤を使用してください。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1. 処置部から滲出液や出血が見られる場合には使用しないこと。
- 2. 明らかに感染症を有している部位には使用しないこと。
- 3. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。

4. 皮膚の弱い方には、同じところに繰り返し貼らないこと。
5. 貼付部位は、感染症・皮膚障害の兆候を確認するため、毎日観察すること。
6. 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。
7. 処置部を清潔にし、水気をよく取ってから貼付すること。特に消毒剤等を使用の際は乾燥してから貼付すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

* 2. 有効期間

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

リバテープ製薬株式会社
熊本県熊本市北区植木町岩野45
TEL 0120-199-189

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社
大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

- * <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)