

医 0 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000

エレバン

再使用禁止

（滅菌済医療機器）


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴のある患者への使用は禁止。

【形状、構造及び原理等】

粘着テープ：ポリ塩化ビニル製フィルム、ゴム系粘着剤
パッド：不織布、ポリエチレンネット

＊ ＊ セパレータ：紙

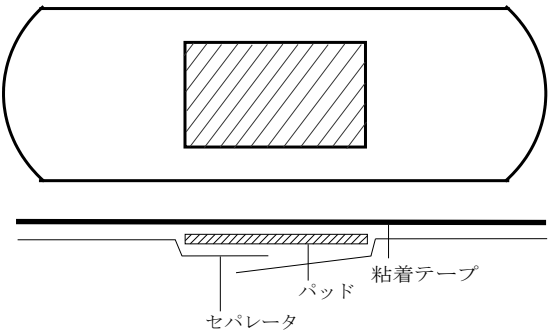

種類	サイズ	1 箱入数
No. 100M	19mm×72mm	100 枚
No. 200M	19mm×72mm	200 枚
No. 300L	25mm×72mm	100 枚

【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷面の被覆及び保護

【使用方法等】

傷口とその周辺を清潔にし、パッドに触れないようにして、セパレータをはぎ取り、パッドを傷口に当て粘着部分で皮膚に固定する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し医師に相談してください。

2. 本品の使用は 1 回限り、再使用しないこと。
3. 滅菌済ですので、個包装を破損しないようにご注意ください。
4. 包装開封後、速やかに使用すること。
5. 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
6. 1 日に 2 ～ 3 回貼り替えること。
7. パッド部分の濡れ、汚れは傷の治りが悪くなる場合があるので貼り替えること。
8. 粘着面を患部に貼らないこと。
9. 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
10. 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。

2. 有効期間

＊ ＊ 本品の容器に記載

〔自己認証（自社データ）による（使用期限参照）〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

＊ TEL 03-5422-3365