

医 04 整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 JMDN コード 11751000


ラップキュアドレッシングII

再使用禁止

**【禁忌・禁止】
再使用禁止**

【形状・構造及び原理等】

パッド：脱脂綿の両面にポリエチレンネット

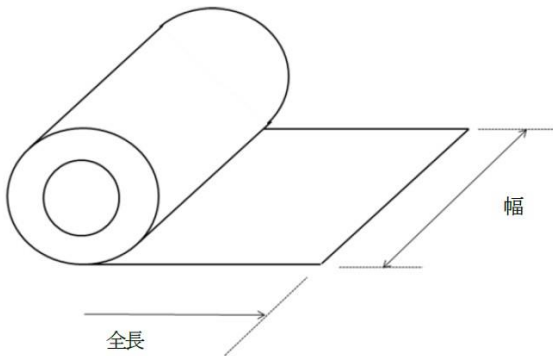

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にして、ロール状のものから必要な寸法を切り取ったパッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

【使用上の注意】


- 重要な基本的注意
 - パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに取りかえること。
 - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
 - 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行うことから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
 - 小児の手の届かないところに保管すること。
- 有効期間
 - 本品の容器若しくは被包に記載
 - [自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

 阿蘇製薬株式会社

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 91-1

TEL 03-5422-3365

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)