

医 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ JMDNコード 32374000

## ハクゾウオペガーゼG（ヒモ付）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- \*2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- \*3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

#### 【形状・構造及び原理等】

\*綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品に、X線で検知できる糸を織り込み、柄を取り付けている。

[X線造影材]

名 称	成 分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

#### 【使用方法等】

\*使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\*1. 体内に留置しないこと。
  2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- \*4. 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
\*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- \*<http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)