

エレファスポンジNEO (ヒモなし)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

- **2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- **3. 電気メス等を近付けないこと。 [引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて縫製したもので、X線で検知できる糸を取り付けている。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム (造影剤) ・ポリプロピレン (固定材) ・ウルトラマリン (着色剤)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

- *使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- **1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行うから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

**<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)