

医 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

## エレファスポンジG（ヒモ付）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- \*\*2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
【切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある】
- \*\*3. 電気メス等を近付けないこと。【引火する恐れがある】

#### 【形状・構造及び原理等】

綿 100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて四方を千鳥縫いで縫製したもので、X線で検知できる糸及び柄を取り付けている。

[X線造影材]

名 称	成 分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

- \*使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- \*\*1. 体内に留置しないこと。
  2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行うから使用すること。
  - \*\*4. 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載  
【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
\*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
\*\*<http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)