

## ハクゾウ滅菌ラパットNEO（ヒモ付）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 1. 再使用禁止

- \*\*2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- \*3. 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて縫製したもので、X線で検知できる糸及び柄を取り付けている。  
本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・ポリプロピレン（固定材） ・ウルトラマリン（着色剤）

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

\*使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- \*\*1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。  
3. 包装開封後、速やかに使用すること。  
\* 4. 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

##### \*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

\*\*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)