

滅菌エレファスポンジ（ヒモなし）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

綿100%の綿糸により構成されたガーゼを重ねて四方を千鳥縫いで縫製したものである。

本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具をいう。

【使用方法等】

*使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- **1. 体内に留置しないこと。
- 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)