

医 04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド JMDN コード 32572000

ガーゼ巻きコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 電気メス等を近づけないこと。【引火する恐れがある】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・ 製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

※ <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿をガーゼで包み込み、端を糸で結んだもの。

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコットンまたは合成繊維等のパッドをいう。

【使用方法等】

※ 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
- ※ 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- ※ 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- 4. 糸を強く引っ張らないこと。
- 5. 製品を分解して使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

※ 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】