

## 滅菌ガーゼ巻きコットンG

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 電気メス等を近づけないこと。[引火する恐れがある]

#### 【形状・構造及び原理等】

\*\*脱脂綿やガーゼとX線造影材の組み合わせからなり、成形や縫製や表面加工によって一体化したもので、更に酸化エチレンガス(EOG)による滅菌を行ったものである。

[X線造影材]

| 名称    | 成分  |
|-------|---|
| X線造影糸 | ・硫酸バリウム(造影剤)<br>・スチレン系エラストマー(固定材)<br>・TET 5MA636 GRN(着色剤) |

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- 体内に留置しないこと。
  - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 包装開封後、速やかに使用すること。
  - 糸を強く引っ張らないこと。
  - 製品を分解して使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- \*\* <https://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)