

## ハクゾウ圧迫綿

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

\*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

#### 【形状・構造及び原理等】

\*\*ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維、脱脂綿、又は、カルボキシメチルセルロースナトリウムで表面加工された脱脂綿を楕円筒状や円筒形等に加工したものである。

#### 【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。止血部分に圧迫止血できる程度におさえて、テープや包帯で固定する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意

- \*1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

##### \*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]