

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 止血用押圧器具 JMDN コード 70617000

ハクゾウタブレット綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*綿 100%を円盤状に圧縮整形したものである。また、カルメロースナトリウムで表面加工したものや、中心部にシリコンラバーやポリエチレン等の被覆材を付けたものもある。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。止血部分に圧迫止血できる程度におさえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- * 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

* 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)