

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDN コード 11028000

ヒモ付き滅菌プレット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*綿 100%の脱脂綿を球状に加工したものに紐を取り付けたものである。本品は酸化エチレンガス (EOG) による滅菌を行っている。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

1. 適当な大きさの容器に本品を処置に必要な量を入れ、消毒薬等を含浸させる。清潔なピンセット等で把持し、処置部分に塗布する。
2. 適当な大きさの容器に本品を処置に必要な量を入れ、清潔なピンセット等で把持し、体液等を吸収させる

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- ** 1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ** 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
*大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
* <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)