

ハクゾウトレンディ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- * 綿 100%の不織布製品である。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- * 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- **1. 体内に留置しないこと。
 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載
[自己認証 (自社データ) による (使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
*大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
**<http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)