

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード 34655000

ハクゾウ滅菌HMガーゼ（カット入り）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布で、Y字、T字等の切り込みを入れている。本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行ったものである。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- * 1. 体内に留置しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

** [自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)