





『エレファコットンツインパック専用固定台』ご使用方法

STEP①

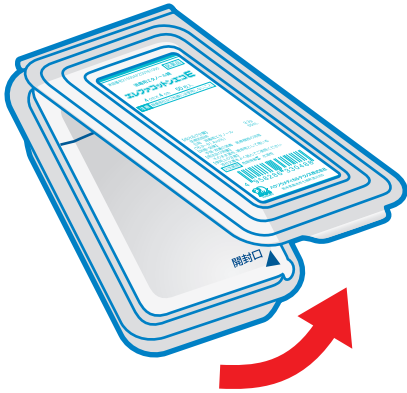

最初にアルコール綿の容器の蓋を開けます。
(アルミ部分は開けません。)

STEP②

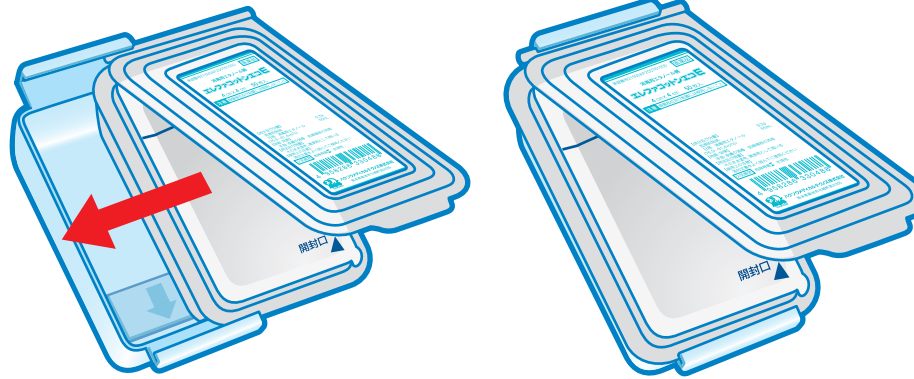

蓋を開けた状態で、固定台に容器を横からスライドさせます。この時、蓋底の矢印部分がアルコール綿の前側に来るようにします。


徐々にスライドさせていき、最後まで入れ込んでいきます。
(イラストは完全に入った状態。)

STEP③




次に、アルコール綿のフタを閉じます。

STEP④

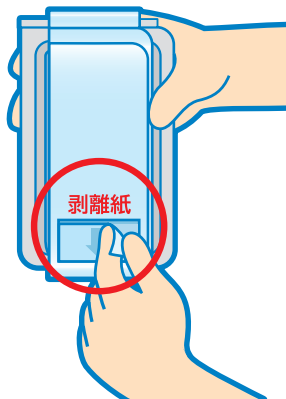

固定台の裏側の剥離紙を剥がし、粘着部分を下に向けます。

STEP⑤

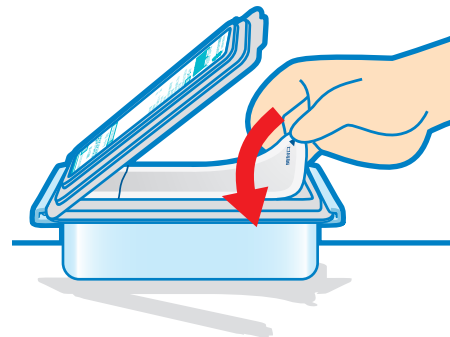

最後に作業台に固定すれば完了です。
(片手で開封操作が可能です。)

取り外す時は



使用后、固定台を作業台から取り外す時は、後ろ側から取ってください。

※粘着剤は数回使用すると、弱くなっていきますが、水で洗うと、粘着力は元に戻ります。

