




プラスチックエプロン着脱手順

プラスチックエプロン着用の際は、外側が汚染しないように、外す際は外側の汚染面に触れないように、汚染面を包み込むように脱ぐのがポイント

[着け方]

step.1

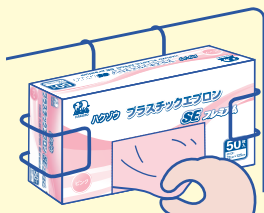

箱から1枚ずつ取り出します。

step.2



内側が**相手側**に向くように開きながら、そっとかぶります。


※逆に着用してしまわないように内側・外側をきちんと確認してから着用するようにしてください。

step.3



かぶった後、両端をもちながらゆっくり下に広げていきます。
(この時、エプロンは**相手側に触れないように注意してください。**)

step.4

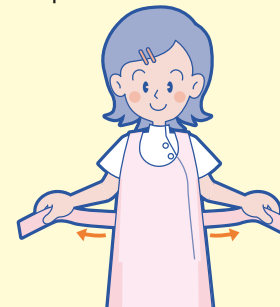

エプロンを最後まで上げ終わったら、腰ヒモを手に取ります。


step.5



最後に腰ヒモを後ろで結びます。

[外し方]

step.1

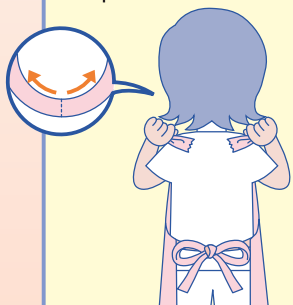

首にかけたヒモの部分**を強く引いて切り**ます。

step.2



腰ヒモの高さまで上半身部をおろします。

step.3



左右の裾を腰ヒモの高さまで持ち上げて**外側(汚染部分)**を中に折りこんでいきます。

step.4



後ろの腰ヒモを強く引っ張り切り切ります。

step.5



外側(汚染部分)に触れないように両端を持ちながら三折にくるみ**感染性廃棄物**として捨ててください。

step.6



最後に**手指衛生**を行います。