





プラスチックグローブ着脱手順

着け方

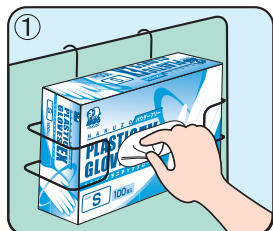


① 利き手で箱からつまんで取り出します。

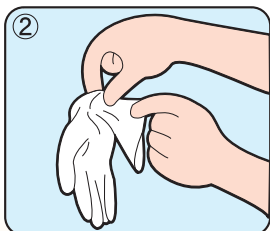


② 手袋を利き手からもう一方の手に持ち替えます。




③ 持ち替えた後、親指の位置を確認します。

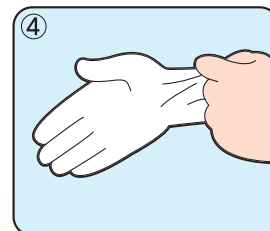


④ 手袋の外側はなるべく何処にも触れないように利き手に装着します。

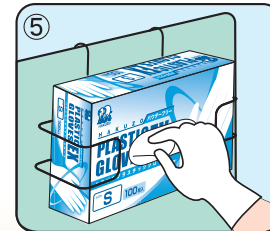

⑤ 装着した手で、箱から手袋を取り出します。

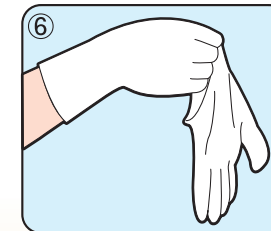


⑥ もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着した手に持ち替えます。

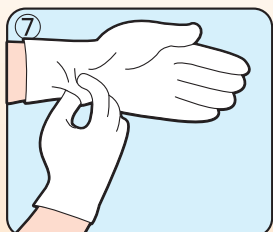


⑦ 手袋をした手が何処にも触れないように装着します。

手袋の着け方・外し方は感染予防の点からも非常に重要です。
着用時は手袋の表面を汚染しないように、外す際は、汚染した手袋の表面に触れないようにする配慮が必要です。


外し方

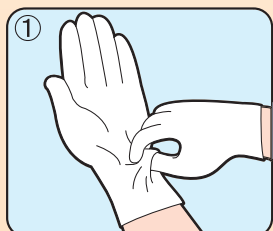

① 利き手で一方の手袋の袖口から3～5cmの部分をつかみます。

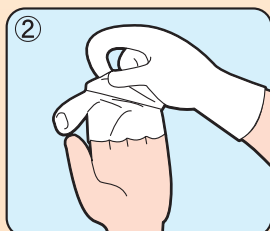

② 手袋をひっくり返し（外側が内側にくるように）抜いていきます。

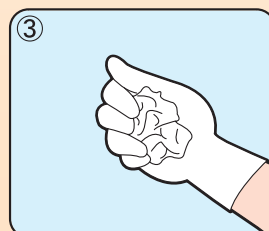


③ 手袋を抜いた後、手袋を利き手の手袋の中で丸めて握ります。



④ 汚染した手袋の外側に触れないように、手袋を外した手で利き手の袖口の中に入れ、同様にひっくり返します。



⑤ 利き手の手袋を上に向けて外していきます。

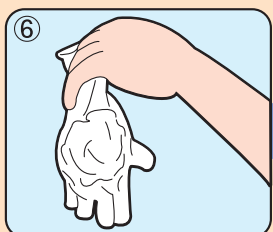

⑥ 外した後は手袋を**感染性廃棄物**として捨てます。



⑦ 最後に**手指衛生**を行います。

手袋を着用する時：血液体液等に触れる可能性があるとき

手袋を外す時：一連の作業が終了したとき、その場で外す