


使用目的

気管切開や胃瘻などの処置をする際、創傷面の保護・滲出液の吸収に使用します。


Yカットガーゼ 使用手順




手をよく洗い清潔にしましょう。

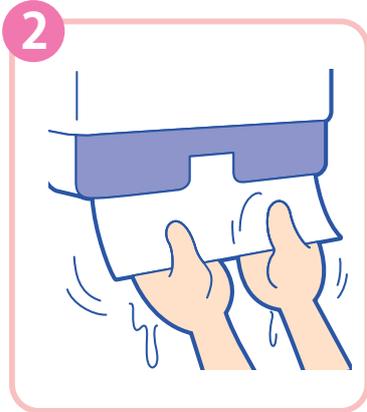


ペーパータオルで濡れた手を完全に拭き取りましょう。

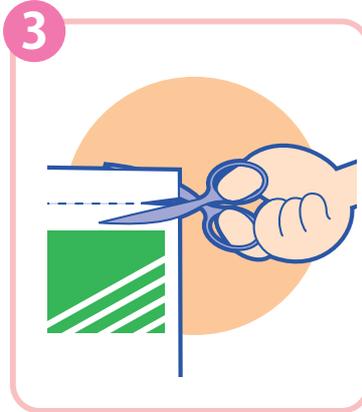


袋を清潔なハサミで切りYカットガーゼを取り出しましょう。

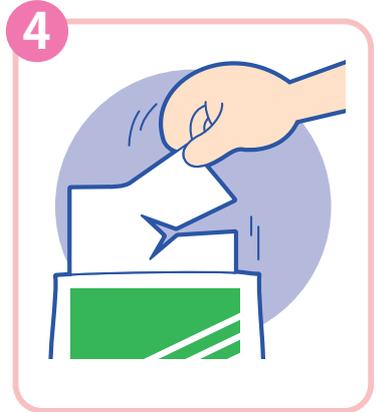

気管切開の患者様には・・・

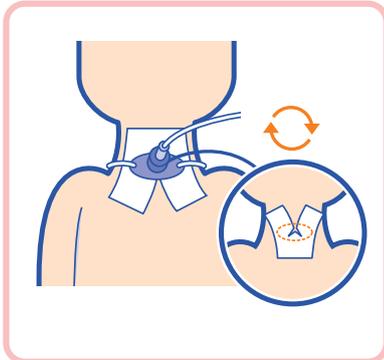

胃瘻等の患者様には・・・

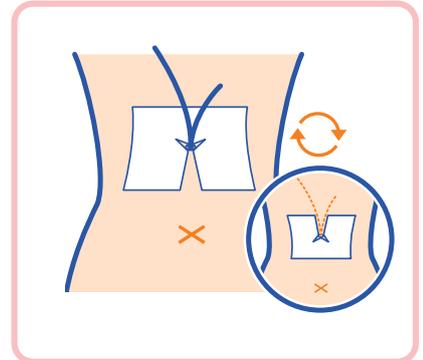

処置に応じ、医師・看護師の指示に従った方法で行いましょう。

皮膚と気管チューブの間に挟み、綿テープ等で固定しておきましょう。



皮膚と胃瘻チューブの間に挟み、綿テープ等で固定しておきましょう。

※ガーゼの挟み方は、自分に合った方法でしましょう。

【使用上の注意】

- 本品は滅菌処理をしていますが、開封後は速やかにご使用ください。
- 有効期限が過ぎているもの、包装が破損している時は使用しないでください。
- 再使用しないでください。