


使用手順


1

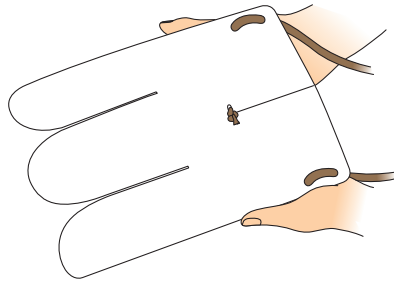

洗濯はさみが付いている方を外側に
して持ちます。


※クリアファイル（ポリプロピレン製ファイル）

2

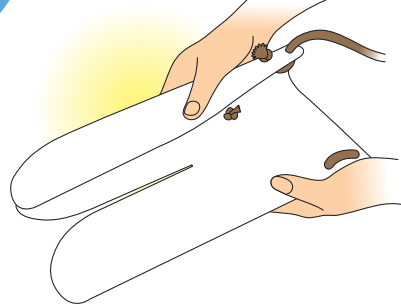

図のように内側に折ります。


3

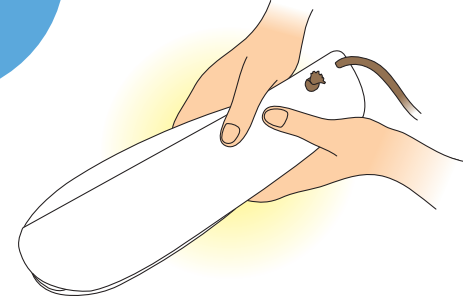

反対側も折り、図のようにまとめます。


※三つ折りにした時、洗濯はさみ下部を包み込む
ように把持すると力の弱い患者様でも靴下を
セッティングすることが容易となります。

4

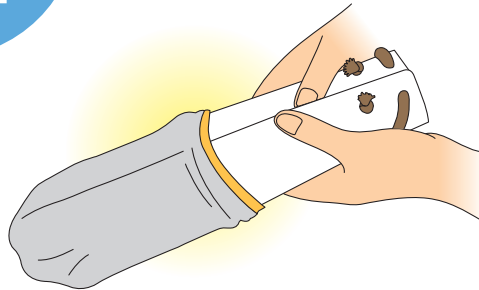

靴下の中に入れます。


5

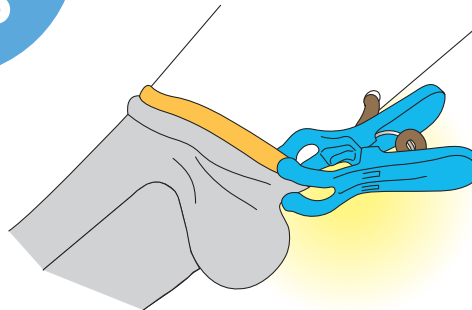

洗濯はさみを靴下の端（後面）にとめます。

※少し浅めにとめた方が外れやすいです。


6

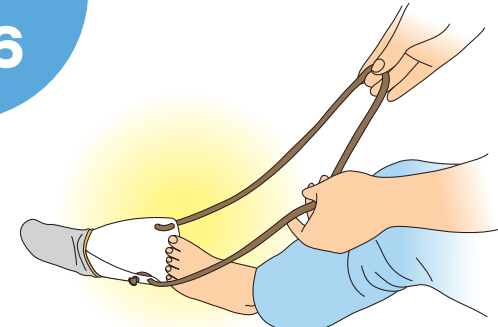

ひもの端を持ち足先へスルっとはける君
を設置します。

※股関節の手術をした方は、脱臼股位をとらないように
してください。


7

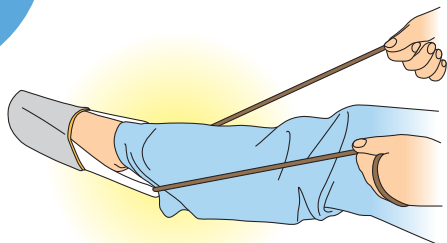

スルっとはける君の中に足を入れます。


※手に巻きつけた方が、引き上げやすいです。

8

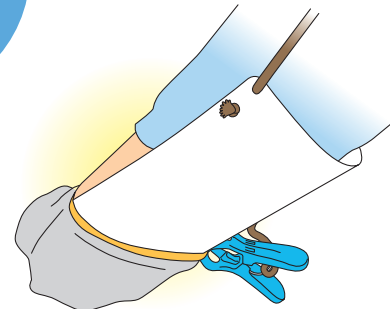

ひもを巻取りながら引っ張ります。

9

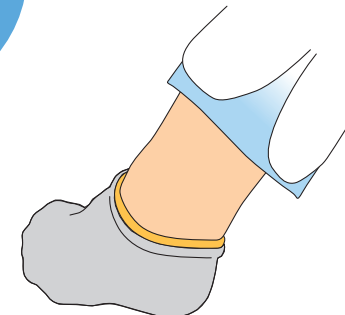

完成です!!