



プラスチックガウンの着脱手順 (ゴムそでタイプ)



[着け方]

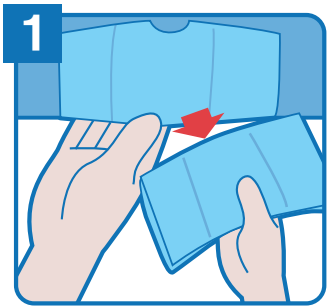

1 箱から一枚ずつ取り出してください。

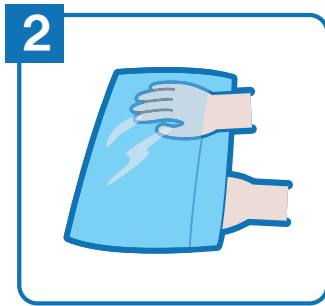

2 上部ポケットに手を入れます。




3 ガウンを展開し、袖に腕を通します。



4 首を通し、袖口に手を通してください。



5 背面の腰ヒモを結びます。

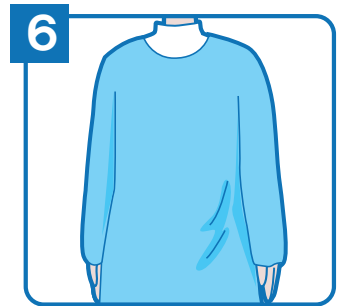

6 完了です。


[外し方]




1 矢印の方向に引っ張り、首の部分をちぎります。




2 腰ヒモを矢印の方向に引っ張り、腰ヒモをちぎります。

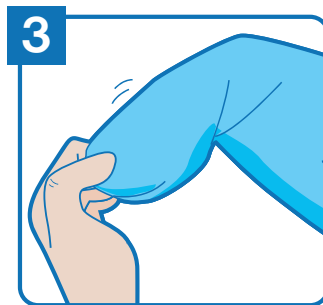

3 どちらかの袖口の内側へ手を滑り込ませ、袖口を引き抜き、もう一方の手を覆ってください。

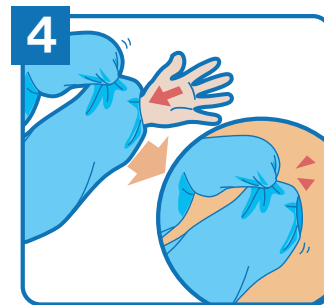

4 引き抜いた袖口をもう一方の袖口を持ち、引き抜いてください。

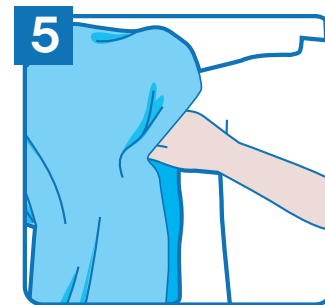

5 引き抜いた手を反対側のガウンの肩の内側に入れて、汚染面を内側に入れて腕を抜いてください。



6 汚染面が内側になるように丸めて感染性廃棄物として捨ててください。




エプロンと同じく、外側は汚染されている可能性が高い。汚染面を内側に包み込むように。

⇒ 最後に手洗いを。

プラスチックガウンの着脱手順（親指フックタイプ）



[着け方]

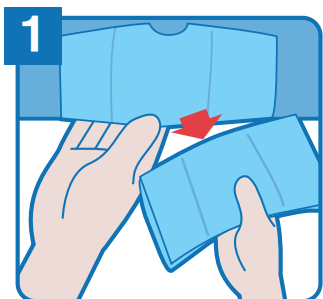

1 箱から一枚ずつ取り出してください。



2 上部ポケットに手を入れます。




3 ガウンを展開し、袖に腕を通します。



4 首を通し、袖口に手を通してください。



5 背面の腰ヒモを結びます。

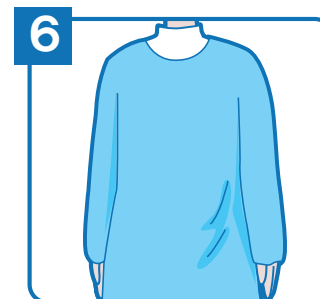

6 完了です。


[外し方]



1 矢印の方向に引っ張り、首の部分をちぎります。



2 腰ヒモを矢印の方向に引っ張り、腰ヒモをちぎります。

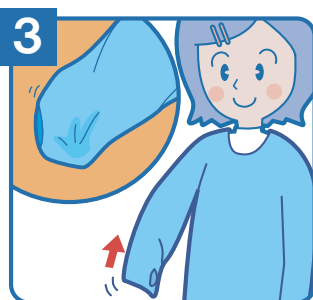

3 どちらかの手を袖口の内側へ滑り込ませます。



4 ガウン内に滑り込ませた手で、もう一方の袖口をつかみ、片袖を引き抜きます。



5 引き抜いた手を反対側の袖の肩口に入れ、汚染面が内側になるよう、裏返ししながら腕を抜きます。



6 外側（汚染部分）に触れないように、汚染面を内側に丸めて感染性廃棄物として捨ててください。

ポイント
Point!!!

エプロンと同じく、外側は汚染されている可能性が高い。汚染面を内側に包み込むように。

⇒ 最後に手洗いを。