


# ハクゾウファインガード ARタイプ 取り付け方法



ハクゾウメディカル株式会社



## STEP①

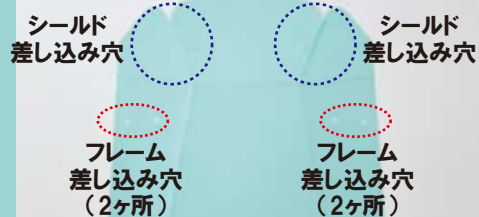

グリーンの傷防止フィルム付き

シールド(レギュラータイプ)とフレームを準備してください。

## STEP②

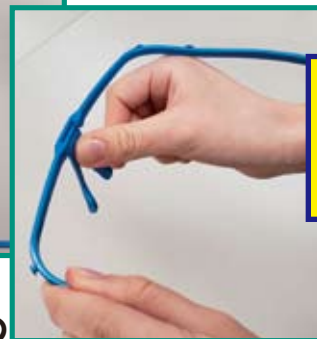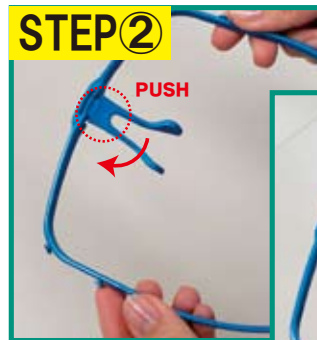


フレーム ノーズ部の『PUSH』の部分を押込み固定します。

## STEP③



傷防止フィルムを剥がします。


## STEP④

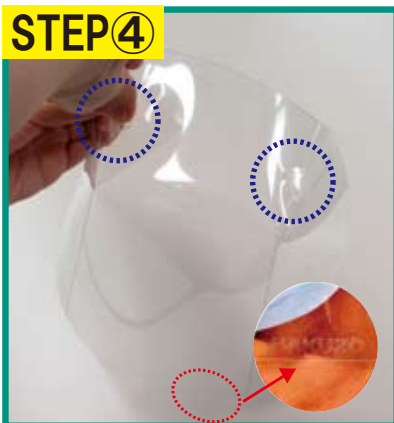

シールド上部2ヶ所を差し込んでください。

※『HAKUZOU』の文字が外から読めるように装着してください。

## STEP⑤

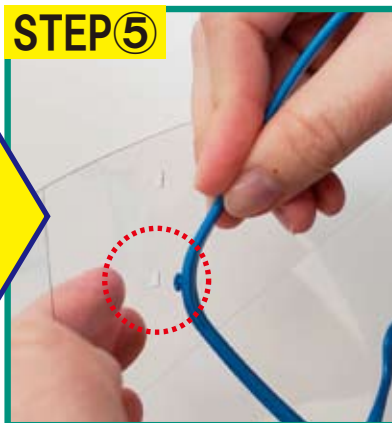


シールド左右4ヶ所の穴にフレームの突起を合わせ、シールドを押し込んでいきます。

## STEP⑥



取り付け完了です。

## 取り外し方法

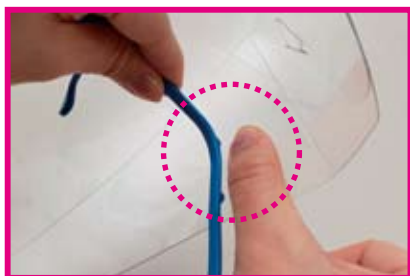

シールドの内側から穴近くを押し、シールドを外します。



ゴミ箱の上で、外側に触れず内側を押し込むことで、汚染部分に触れずに取り外しできます。

取り付け動画は下記QRコードからご確認いただけます

