


ハクゾウファインガード アイシールド ARタイプ 取り付け方法




STEP①

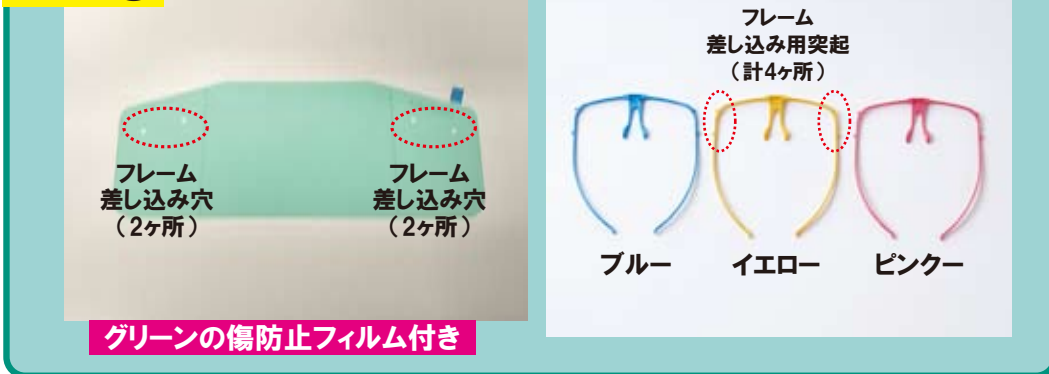

シールド(ARタイプ)とフレームを準備してください。

STEP②

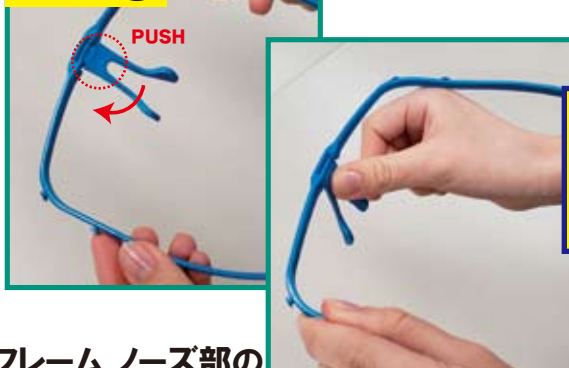

フレーム ノーズ部の『PUSH』の部分を押し込み固定します。

STEP③




傷防止フィルムを剥がします。

STEP④



折り目によって折り曲げます

STEP⑤

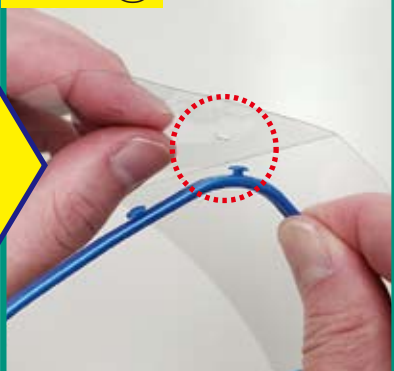


シールド左右4ヶ所の穴にフレームの突起を合わせ、シールドを押し込んでいきます。

STEP⑥



取り付け完了です。

※『HAKUZO』の文字が外から読めるように装着してください。

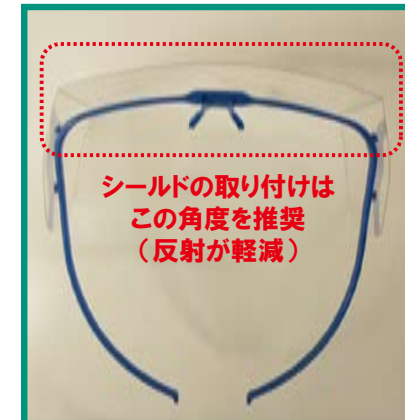

取り外し方法



シールドの内側から穴近くを押し、シールドを外します。



ゴミ箱の上で、外側に触れず内側を押し込むことで、汚染部分に触れずに取り外しできます。

取り付け動画は下記QRコードからご確認いただけます

