


あわの色をみて、手洗いチェック!

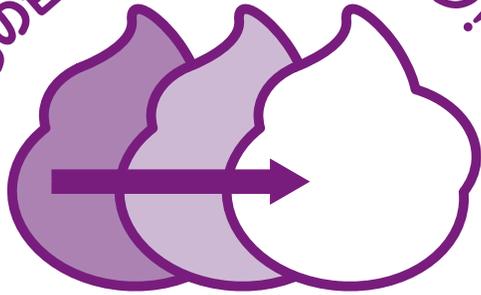

オートディスペンサー

MOCO™

ランプの色で手洗い時間をお知らせしてくれます。



約**30秒** 泡が白色に変わるまで、手をスクラブしてください。



1 手指を流水でぬらします。



2 ディスペンサーからあわ物語 iromiru の泡を適量取り出します。むらさき色の泡が出ます。



3 手のひらをこすり合わせよく泡立えます。



4 両手の指の間をこすり合わせます。泡の色は徐々に薄くなります。



5 手の甲をもう片方の手のひらでこすります。



6 指先をもう片方の手のひらでこすります。さらに薄くなります。



7 親指をもう片方の手で包みこすります。



8 両手首まで丁寧にこすります。泡の色が白くなっているのを確認します。



9 流水でよくすすぎます。



10 ペーパータオルを取ります。



11 指間や手の甲を含め、手指全体の水分を良く拭き取ります。



12 最後に手首までしっかり拭き取り十分に乾燥させます。

ハクゾウメディカル株式会社