

環境除菌用ウェットクロス



# エレファウエット® Ag+

## クロス ELEPHA WET AG+

アルコール除菌に、**銀系抗菌剤** × **超親水コート**による持続性を  
プラスした**「持続除菌」**できる環境除菌用ウェットクロス

持続  
除菌

エタノール  
濃度  
**80%**

- 80%エタノールを含浸しており、  
銀による**抗菌をプラス**しています。
- 銀系抗菌剤に超親水性ポリマーを  
組み合わせるHydroAg<sup>+</sup>技術により、  
従来になく**高い抗菌性能が長期間  
持続**します。

(※使用方法や頻度、使用環境によって、効果の持続時間は異なります。)




詰替用



専用ボトル

### 従来品同等の除菌性能に銀の持続性をプラス

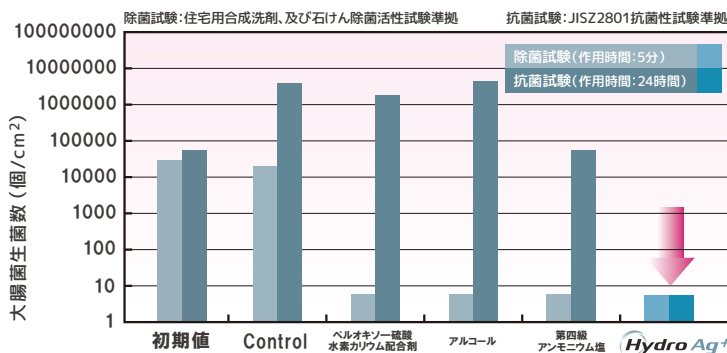

ハイドロ エージープラス

HydroAg<sup>+</sup>とは、銀系抗菌剤に超親水性ポリマーを組み合わせるFUJIFILMの技術です。

# エレファウエット® Ag+ クロス

持続  
除菌

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydroAg+技術(エレファウエットAg+)の場合、拭き取り直後は**除菌**され、アルコール揮発後も**抗菌性**が持続。



### 【適応素材】

ABS樹脂、ステンレス、アルミニウム、塩化ビニールシート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、真鍮、陶器  
 (\*拭き跡が白く目立つ場合には、アルカリ洗浄剤で、HydroAgコーティング膜を除去してください。)

成分:エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤  
 サイズ:140mm×180mm  
 入数:100枚入

### 【使用用途】


●テーブル・ドアノブ・ベッドまわりの洗浄・除菌 ●汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌

### 【製品規格】

品番	規格	写真	包装	1梱入数	JANコード
3395061	専用ボトル		1本	15本	4 958286 7111706
3395062	詰替用 140mm×180mm		100枚/個	15個	4 958286 7111713

※詳細は、各営業窓口までお申し出ください。

### HydroAg+ 塗り重ね効果

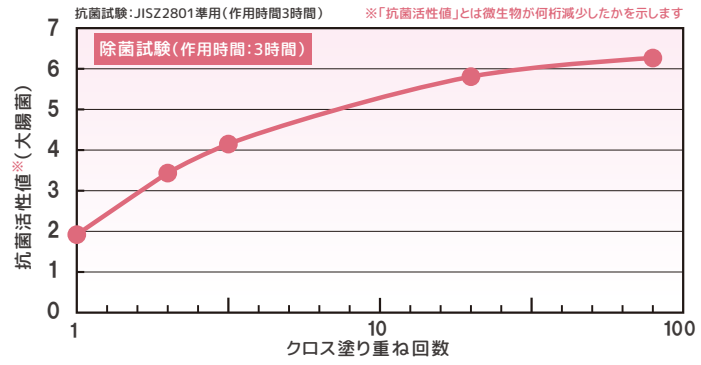

### 【安全性】人体へのリスクを防ぐ高い安全性

経口毒性	(LD50>2,000mg/kg) GHS区分は「区分外」
皮膚刺激性	(無刺激) GHS区分は「区分外」
皮膚感作性	LLNA:BrdU-ELISA法 陰性
生殖細胞変異原性	Ames試験 陰性
発がん性	IARCランク1, 2A, 2B 該当物質なし

### 【使用方法】



1 容器のフタを外し、内袋 (又は詰替用) をボトル 2 ロールの中央から1枚 3 フタ中央の取り出し口 4 フタを締め、取り出し口 から出てくるクロスを通す。 5 引き出して使用します。

### 【使用上の注意】

- 火気のそばで使用しないでください。●目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。●アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用されている場合には、肌荒れ等にご注意ください。●必要に応じて、手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。●蒸気、ミストを吸入しないようにしてください。
- 素材によっては変色、変質する場合がありますので、目立たない部分で確認してから使用してください。●拭き跡が白く目立つ場合には、アルカリ洗浄剤でHydro Agコーティング膜を除去してください。●人体や食品・食器には使用しないでください。●用途以外には使用しないでください。

※専用ボトルに中身は入っておりません。予めご了承ください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
 TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318   | 神戸営業所 ☎078-940-8975  |
| 東京支店 ☎03-3522-6720    | 広島営業所 ☎082-849-4188  |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045   | 四国営業所 ☎0875-52-6900  |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900   | 北九州営業所 ☎093-617-3911 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434   | 福岡営業所 ☎092-481-5921  |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780   | 熊本営業所 ☎096-345-2253  |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451  | 札幌駐在所 ☎011-788-8009  |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447   | 盛岡駐在所 ☎019-613-2176  |
| 三重営業所 ☎059-350-3844   | 北陸駐在所 ☎076-225-8013  |
| 京都営業所 ☎075-603-4826   | 山陰駐在所 ☎0859-30-2193  |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  |
| 阪神営業所 ☎078-262-1634   |                      |