



HAKUZO パウダーフリー

PLASTIC GLOVES EL

ハクゾウプラスチックグローブ

衛生的なパウダーフリー加工の

プラスチックグローブ

100枚入



Good Points


▶ パウダーフリー加工を施し、
パウダーの飛散による汚染
リスクがなく衛生的です。

▶ パウダーによる手荒れ、
手指・衣服への付着等の
心配がありません。

ハクゾウメディカル株式会社

ハクゾウプラスチックグローブ 着脱方法

装着手順

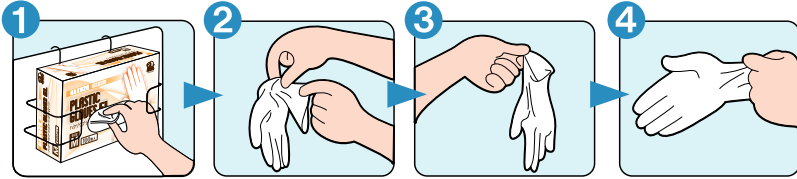


1 利き手で箱からつまんで取り出します。
 2 手袋を利き手からもう一方の手に持ち替えます。
 3 持ち替えた後、親指の位置を確認します。
 4 手袋の外側はなるべく何処にも触れないように利き手に装着します。



5 装着した手で、箱から手袋を取り出します。
 6 もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着済の利き手に持ち替えます。
 7 手袋をした手が何処にも触れないように装着します。

脱着手順

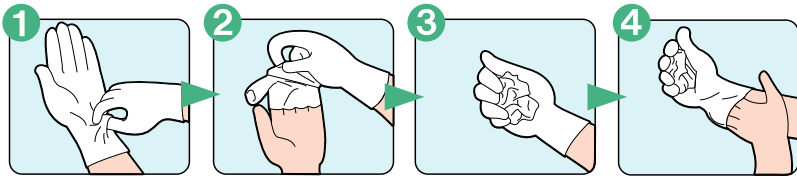

1 利き手で一方の手袋の袖口から3~5cm部分をつかみます。
 2 手袋をひっくり返し(外側が内側になるように)抜いていきます。
 3 手袋を抜いた後、手袋を利き手の手袋の中で丸めて握ります。
 4 汚染した手袋の外側に触れないように、手袋を外した手で利き手の袖口の中に入れて、同様にひっくり返します。



5 利き手の手袋を下に向けて、外していきます。
 6 外した後は手袋を廃棄します。
 7 最後に手洗いをします。

材質

- ポリ塩化ビニル



グローブ・エプロン用ホルダー

壁掛け用ホルダー(縦向き)

マスク用ホルダー

壁掛け用ホルダー(横向き)



ラック楽ホルダーシリーズ

グローブ、エプロン、マスク、キャップ等のPPE製品を設置するホルダーもご用意しています(別売)。

※写真はラック楽ホルダー-NETとなります。

使用上の注意

- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用をおやめください。
- 熱いものには触れないでください(火傷する恐れがあります)。
- 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)にはご使用は避けてください。
- 油脂、脂肪性食品を含有する食品やその器具及び容器包装を取り扱う際にはご使用を避けてください。
- 爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

品番	サイズ	包装	1 梱入数	JANコード
3024101	S	100枚/箱	20箱	4 958286 706269
3024102	M	100枚/箱	20箱	4 958286 706276
3024103	L	100枚/箱	20箱	4 958286 706283

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 本社営業部 ☎06-6809-4318 | 京都営業所 ☎075-603-4826 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 四国営業所 ☎0875-52-6900 |
| 神戸支店 ☎078-976-8901 | 北九州営業所 ☎093-617-3911 |
| 仙台営業所 ☎022-399-7091 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |