

立体商標  
登録第6173515号



HAKUZO

パウダーフリー

PLASTIC  
GLOVES

ハクゾウプラスチックグローブ

MF

80枚入

衛生的なパウダーフリー  
80枚入のコンパクト包装の  
プラスチックグローブ



コンパクトな箱サイズ  
\*従来比で入数が80%で、  
体積が約半分!!



※弊社製品『プラスチックグローブEX』小箱との比較。

様々なシーンでご利用いただけるように工夫した  
弊社独自の形状です。(立体商標取得済)

コンパクト包装なので、  
専用ホルダーに2サイズ  
設置してご使用できます。

花柄を合わせると  
正しい位置で取り出し  
できるようになります。



1サイズ 2サイズ

ハクゾウメディカル株式会社

## 製品特長

**特長①** コンパクト包装なので、専用ホルダーに2サイズ設置できます。  
(花柄を合わせると正しい位置で取り出しできます。)



※専用ホルダーに設置する場合、箱天面からグローブを取り出してください。

**特長③** 側面の取り出し口は、グローブの袖口(手首側)から取り出すことができます。



**特長②** 箱側面にも取り出し口がありますので、重ねて使用する場合や置いて使う場合も取り出すことができます。



箱側面にも取り出し口があります。



箱側面では袖口(手首側)から取り出せます。

## 装着手順



1 利き手で箱からつまんで取り出します。

2 手袋を利き手からもう一方の手に持ち替えます。

3 持ち替えた後、親指の位置を確認します。

4 手袋の外側はなるべく何処にも触れないように利き手に装着します。

5 装着した手で、箱から手袋を取り出します。

6 もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着済の利き手に持ち替えます。

7 手袋をした手が何処にも触れないように装着します。

## 脱着手順



1 利き手で一方の手袋の袖口から3~5cm部分をつかみます。

2 手袋をひっくり返し(外側が内側になるように)抜いていきます。

3 手袋を抜いた後、手袋を利き手の手袋の中で丸めて握ります。

4 汚染した手袋の外側に触れないように、手袋を外した手で利き手の袖口の中に入れ、同様にひっくり返します。

5 利き手の手袋を下に向けて、外していきます。

6 外した後は手袋を廃棄します。

7 最後に手洗いをを行います。

品番	種類	小箱入数/サイズ/重量	ケース入数/サイズ/重量	JANコード
3024111	S	80枚/箱 W128×D125×H80mm 約 330g	30箱/ケース W420×D390×H280mm 約 10.9kg	4 958286 709529
3024112	M	80枚/箱 W128×D125×H80mm 約 370g	30箱/ケース W420×D390×H280mm 約 12.1kg	4 958286 709536
3024113	L	80枚/箱 W128×D125×H80mm 約 410g	30箱/ケース W420×D390×H280mm 約 13.3kg	4 958286 709543

※詳細は各営業にお問い合わせください。



**ハクゾウメディカル株式会社**

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
名古屋営業所 ☎052-769-6021 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320