

ハクゾウファイナガード アイシールド

日本製

眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ
シールド交換式のアイガードです。

眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、
眼鏡の上からも着用できます。

防御範囲が広いシールド

眼鏡の上からもフィット

レギュラー

曇りにくい
シールド
採用

採用
シールド

反射防止加工
防曇加工

AR



Design Your Voice

Hakuzo

ハクソウファインガード アイシールド

AR

100枚入

シールドが薄く軽量です。

防曇加工・反射防止加工がされているため、
長時間の使用や穿刺などの
処置時に適しています。


パソコン・電子カルテの使用時の映り込みや
目の疲れを低減します。

PET 0.125mm
(保護フィルム付き)



透過率96%

【反射の比較】
着用者からの視線
※数値は代表値であり、
保証値ではありません。

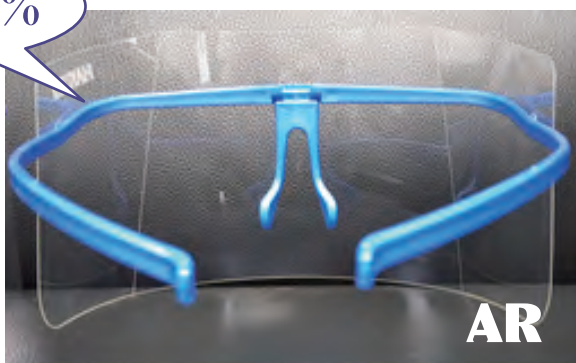

フレームに取り付ける際は、
保護フィルムを取り外し、
装着してください。



採用
シールド

反射防止加工
防曇加工

ハクゾウファインガード アイシールド レギュラー 100枚入

環境にやさしい再生PETシートを使用しています。

特殊加工により曇りにくく、日常的な短時間の使用に適しています。

PET 0.2mm



曇りにくい
シールド
採用


AR・レギュラー共通方法

取り付け方法



シールドに表裏があります。
「HAKUZOU」の文字が外側から
読めるように装着してください。

取り外し方法

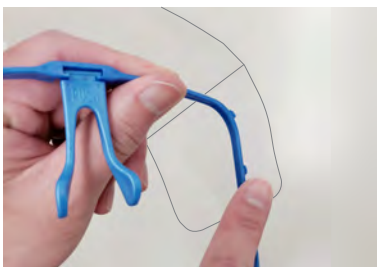

シールドの内側から穴近くを
押し、シールドを外します。



ゴミ箱の上で、外側に触れず内側
を押し込むことで、汚染部分に
触れずに取り外しできます。

シールドを折り目に沿って
折り曲げてください。



シールドの取り付けは
この角度を推奨
(反射が軽減)



シールドは使い捨てです。
アルコール等で清拭すると透明度や
防曇効果が劣化する可能性があります。

フレームのみ ハクゾウファインガード 30 本入



眼鏡のようなフレームでフィットしやすく、
眼鏡の上からも装着できます。

ブルー10本 / イエロー10本 / ピンク10本 (計30本入)



ハクゾウファインガード アイシールド・フェイスシールド



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3002799	フェイスシールドセット レギュラータイプ	フレーム ブルー1本 フィルム5枚	50箱	4 958286 717982
3002800	フェイスシールドセット ARタイプ	フレーム ブルー1本 フィルム5枚	50箱	4 958286 717883
3002801	フレームのみ (ブルー/イエロー/ピンク)	30本入 (各色10本)	12箱	4 958286 717890
3002802	フェイスシールドのみ レギュラータイプ	50枚入	15箱	4 958286 717906
3002803	フェイスシールドのみ ARタイプ	10枚入	100箱	4 958286 717913
3002804	ハクゾウファインガード (アイシールドのみ)	レギュラータイプ 100枚入	15箱	4 958286 718316
3002805	ハクゾウファインガード (アイシールドのみ)	ARタイプ 100枚入	15箱	4 958286 718323

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320