

環境除菌用ウエットクロス



ハクゾウ

環境クロス® 60枚入専用ホルダー


環境クロスシリーズ 60枚入用の専用ホルダーとなります。
使用環境により、取り付け方をお選び頂くことができます。



専用ホルダーは下記の取り付け方法から、お選びいただくことができます。

<p>① 本体</p>	<p>③ 本体+フックパーツ</p>
	
<p>② ネジ式</p>	<p>④ 本体+パイプクランプ</p>
	

ホルダー取り付け方法

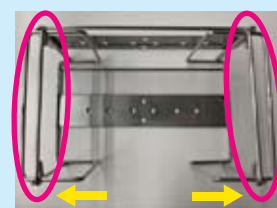

バーを両端に寄せます。



環境クロスを取り付ける



蓋側面の溝にホルダーのバーをはめて、固定する。

【設置イメージ例】（※①～④の設置方法で、前向きと上向きの2パターンでの取り付けが可能です。）

① 本体のみ



『リシールフック』
7.5cm×22cm



弊社製品『リシールフック』を組み合わせることで、左写真のように、平面の壁やラック薬ホルダーNEXT(移動式)に設置できます。


② ネジ式



《取り出し口 天面》



《取り出し口 前面》

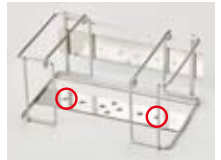



※ネジの固定穴は各面の一番外側の穴です。

③ 本体+フックパーツ



弊社製品『ラック薬ホルダーNET/LIGHT』、回診車やナースカートに引っ掛ける簡易的な設置ができます。

④ 本体+パイプクランプ(φ15~32mm)

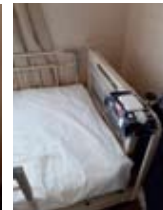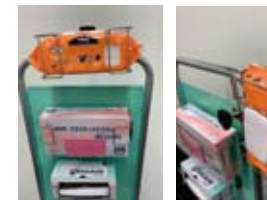

ラック薬ホルダーNEXTやベッドの足もと、ナースカートのパイプ部分に設置できます。

※要望に応じて別パーツもご対応可能です。（※在庫はございません。受注生産品となります。）

《パイプクランプφ28~50mm》 手すりや点滴棒など太めのパイプに設置できます。

《机固定用クランプφ15~40mm》

ナースステーションのテーブルなど厚みのある部分に設置できます。

品番	規格	入数	JANコード
3905070	本体 (重量:約225g)	1個/袋	 4 958286 717296
3905071	ネジ式(本体付)	1個/袋	 4 958286 717302

品番	規格	入数	JANコード
3905072	フックパーツ (本体別売) (重量:約30g)	1個/袋	 4 958286 717319
3905073	パイプクランプ 《φ15mm~32mm》 (本体別売) (重量:約110g)	1個/袋	 4 958286 717326

※詳細は各営業担当にお申し付けください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320