




Design Your Voice

Hakuzo

ハクゾウメディカル株式会社


サージカルマスク装着方法

STEP 1

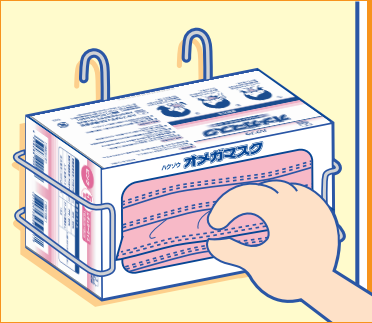

箱から1枚ずつマスクを取り出します。

STEP 2

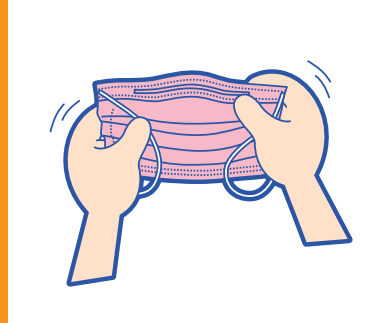

取り出した時、手で触れている方を外側に向け、金具（ノーズフィッター）の付いている方を上にし、色の付いている方が外側になるようにします。

STEP 3



ノーズフィッターを自分の鼻と頬の形に合わせて手で曲げていきます。

STEP 4



ノーズフィッターから手を離さずゴムひもを目にかけます。

STEP 5



反対側の耳も同様にかけます。

STEP 6



鼻と口を十分に覆えるように蛇腹を広げ、あごの下まで引けば完了です。

サージカルマスク使用目的

- 自分を守るため：血液・体液などの飛沫を浴びる可能性のある時
消毒剤・洗浄剤・化学薬品等の飛散防止
- 相手を守るため：咳をする場合（呼吸器衛生・咳エチケット）
マキシマルバリアプレコーション
腰椎穿刺時、調剤時など

脱着ポイント

※マスクを取り外す時は、汚染表面を触らないようにゴムひもを持って取り外すようにしてください。