

# ハクゾウ



Design Your Voice

## Hakuzo

# オメガマスク

50  
枚入

レギュラーサイズ  
16.5cm×9cm

DISPOSABLE SURGICAL MASK

マスク両サイドの加工により、顔のラインにジャストフィットするサージカルマスク



全国マスク工業会「マスク自主基準」適合  
このマスクは全国マスク工業会の「マスク自主基準」に  
適合しています。



### ノーズフィッター

樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属  
でありMRI室等でご使用いただけます。


### 立体構造

立体加工なので、鼻や口を圧迫せず、不快な息苦し  
がありません。

### サイド特殊加工

マスク両サイドの特殊加工で、顔のラインにジャスト  
フィットします。

### 製品の構造

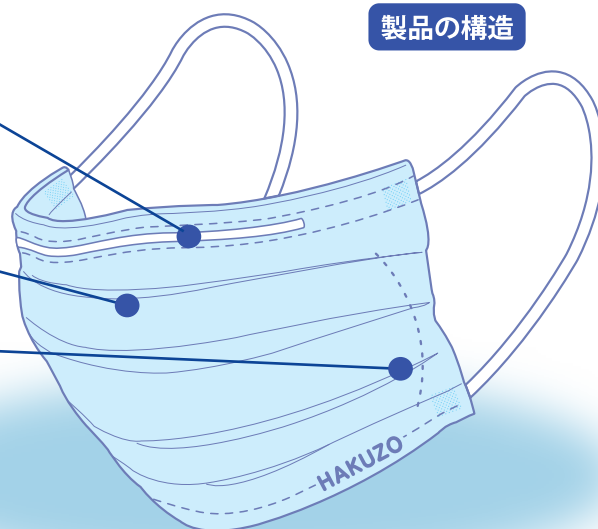

### 【素材】

- 本体・フィルタ部 : ポリプロピレン
- 耳ひも部 : ポリウレタン、ポリエステル
- ノーズフィッター部 : ポリエチレン

### 製品DATA


細菌濾過効率 (平均粒子径3.0μm)	BFE : 99%
微粒子濾過効率 (平均粒子径0.1μm)	PFE : 99%
人工血液バリア性	21.3kPa 透過なし
圧力損失 (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	<5.0

(一財) カケンテストセンター

ハクゾウメディカル株式会社


# サージカルマスク装着方法

## STEP 1

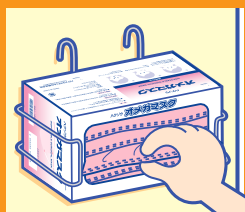

箱から一枚ずつマスクを取り出します。

## STEP 2

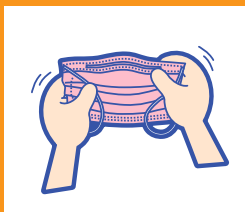

取り出した時、手で触れている方を外側に向け、ノーズフィッターの付いている方を上にし、色の付いている方を外側になるようにします。

## STEP 3



ノーズフィッターを自分の鼻と頬の形に合わせて手で曲げていきます。

## STEP 4



ノーズフィッターから手を離さずゴムひもを耳にかけます。

## STEP 5



反対側の耳も同様にかけます。

## STEP 6



鼻と口を十分に覆えるように蛇腹を広げ、あごの下まで引けば完了です。

## サージカルマスク使用目的

自分を守るため：血液・体液などの飛沫を浴びる可能性のある場合  
消毒剤・洗浄剤・化学薬品等の飛散防止

相手を守るため：咳をする場合（呼吸器衛生・咳エチケット）  
マキシマル・バリアプレコーション  
腰椎穿刺時、調剤時など

## 脱着ポイント

※マスクを取り外す時は、汚染表面を触らないようにゴムひもを持って取り外すようにしてください。

※サージカルマスクの装着手順の下敷きもご用意しています。

## 使用上の注意

- 使用中、発疹・発赤、かゆみなどの症状が現れた場合には使用を中止してください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。

## 保管上の注意

- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

品番	種類	規格	包装	サイズ / 製品重量	1 梱入数	サイズ / 製品重量	JAN コード
3087511	ホワイト	レギュラーサイズ 16.5cm×9cm	50 枚 / 箱	W185×D100×H100mm	30 箱	W520×D384×H322mm	4 958286 900162
				約 200g		約 7.05kg	
3087513	ブルー	レギュラーサイズ 16.5cm×9cm	50 枚 / 箱	W185×D100×H100mm	30 箱	W520×D384×H322mm	4 958286 900155
				約 200g		約 7.05kg	
3087515	ピンク	レギュラーサイズ 16.5cm×9cm	50 枚 / 箱	W185×D100×H100mm	30 箱	W520×D384×H322mm	4 958286 900179
				約 200g		約 7.05kg	

※詳細は各営業にお問い合わせください。



**ハクゾウメディカル株式会社**

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320