

ハクゾウおうと物処理セット

嘔吐物の処理に必要な防護具や環境清掃製品などをセットにした製品です。



7点セット入り



簡単操作! 液パックをひねってつぶすだけ

ひねって含浸
ハクゾウジアパック 1000
入り

次亜塩素酸ナトリウム 45mL
0.1w/v% (1000ppm) + 不織布 5枚
水溶性パルプ(トイレに流せるタイプ)



製品特長

感染対策

◎嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。

省力化

◎防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。

ひねって含浸ハクゾウジアパック 1000 入り

◎ジアパック（次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水溶性パルプを組み合わせた製品）を一緒にセットしています。

主な使用場面

- ◎医療機関（各病棟の備蓄用。外来に。）
- ◎高齢者施設（老人保健施設など。）
- ◎消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

【セット内容】

内容	規格	入数
プラスチックガウン	親指フック	1枚
サージカルマスク	ブルー	1枚
プラスチックグローブ	M	2双
ペーパータオル	2枚重ね	10組
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000	水溶性パルプ 200×300mm	1袋
イエロー袋	Lサイズ	1枚
使用手順書	A5サイズ	1枚
トレー	縦178×横256×高さ40mm	1個

※上記以外の組み合わせについて、別途ご相談を承ります。

品番	規格	包装	製品サイズ (mm)	1個入数	ケースサイズ (mm)	JANコード
			製品重量 (g)		ケース重量 (kg)	
2610343	ICPACK⑤-F	1個	256×178×40	18個/箱	290×350×410	4 958286 055572
			190		4.0	

※詳細は各営業担当にお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318 | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 四国営業所 ☎0875-52-6900 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 北九州営業所 ☎093-617-3911 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 盛岡駐在所 ☎019-613-2176 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | 山陰駐在所 ☎0859-30-2193 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
| 阪神営業所 ☎078-262-1634 | |



ハクゾウおうと物処理セット 使用手順

おうと物処理セットの準備

1 おうと物処理セットの準備

汚物
環境表面におうと物等の汚物が付着。



ハクゾウおうと物処理セット

おうと物処理セットを用意してください。



トレーの四隅のいずれかから透明フィルムを剥がしてください。

2 個人防護具の着用

ガウン → **マスク** → **グローブ**

防護具をガウン→マスク→グローブの順に取り出し装着してください。



トレー

取り出す

トレーに入っているすべての部材を取り出し汚染しないところに、トレーを汚物の近くにおいてください。

おうと物処理手順

3 おうと物の処理

ペーパータオルを取り出し、汚物を外側から内側に向けて、拭き取ってください。



拭き取ったペーパータオルを空のトレーに入れてください。



汚物を完全に拭き取ってください。

ひねって含浸

ジアパック1000を取り出し、液剤パックをひねりつぶし、パックの上から少し揉んで液剤を広げながら袋を開封しワイパーを取り出してください。



次亜塩素酸ナトリウムを含んだワイパーで汚物が付着した表面を清拭してください。



拭き取ったワイパーをトレーに入れてください。

4 処理後

ペーパータオルやワイパーの入ったトレーをイエロー袋に入れてください。



グローブ → **ガウン** → **マスク**

グローブ→ガウン→マスクの順に防護具を脱いでください。



脱いだ防護服をイエロー袋に入れてください。

イエロー袋の紐を結んで密閉し廃棄してください。



石鹸と流水で手洗いを行ってください。



次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取って10分程度経過したら、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭した環境表面を水拭きしてください。