

ハクゾウおうと物処理セット (吸収シート・ヘラ付き)

嘔吐物などの処理に必要な防護具や環境清掃製品などをセットにした製品です。



※本製品はサンプル見本です。



7点セット入り

簡単操作! 液パックをひねってつぶすだけ

『ハクゾウジアパック1000』
 入り

次亜塩素酸ナトリウム 45mL
 0.1w/v% (1000ppm) + 不織布 5枚
水解性パルプ(トイレに流せるタイプ)

製品特長

感染対策

◎嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。

省力化

◎防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。

ハクゾウジアパック1000入り

◎ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)と一緒にセットしています。

主な使用場面

- ◎医療機関(各病棟の備蓄用。外来に。)
- ◎高齢者施設(老人保健施設など。)
- ◎消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

【セット内容】

内容	規格	入数
プラスチックガウン	親指フック	1枚
サージカルマスク	ブルー	1枚
プラスチックグローブ	M	2双
ペーパータオル	2枚重ね	3組
吸収シート	33cm×40cm	1枚
紙製チリトリ		1枚
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000	水解性パルプ 200×300mm	1袋
イエロー袋	Lサイズ	1枚
PE袋		1枚

※上記以外の組み合わせについて、別途ご相談を承ります。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
2610353	(吸収シート・ヘラ付き) PE袋入り	1袋	30袋/箱	 4 958286 057002

※詳細は各営業担当にお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社


〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318 | 阪神営業所 ☎078-262-1634 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 高松駐在所 ☎087-813-7416 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |

ハクゾウおうと物処理セット 使用手順

おうと物処理 セットの準備

1 おうと物処理セットの準備

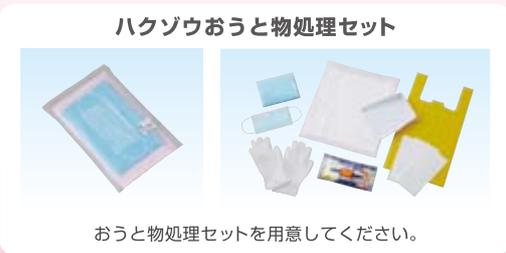

2 個人防護具の着用



3 おうと物の処理



4 処理後



おうと物処理手順