



Design Your Voice  
**Hakuzo**

# 陰部の清潔ケアを見直しませんか？

身体用清拭シート

ハクゾウ

## リラケア<sup>®</sup> Lite

ライト

3枚入

日常ケアの際の身体清拭、失禁・便などの拭き取りにご使用いただける清拭シートです。

温めて、より心地良い清拭を



電子レンジ



専用ウォーマー

### 陰部の清潔ケア、こんなお悩みありませんか？

使用物品が多く、準備やゴミ捨てに手間がかかる。

洗浄のためにお湯を用意する必要がある。

洗浄ボトルの管理が大変、感染リスクが気になる。

患者さまの羞恥心を最小限にしたい。

洗浄から清拭に  
することで…

準備物は清拭シートとグローブのみ！準備が簡便になるだけでなく、ゴミの削減にも繋がります。


袋ごと、電子レンジや専用ウォーマーで温め可能！お湯を準備する手間が不要になります。

水を使わないので、洗浄ボトルの管理が不要になります。また、洗浄水による感染曝露のおそれがありません。

処置時間が短くなるので、患者さまの心理的負担を低減することができます。

**業務効率改善、感染リスク・患者さまの心理的負担の低減につながります。**

## 処置時間の比較

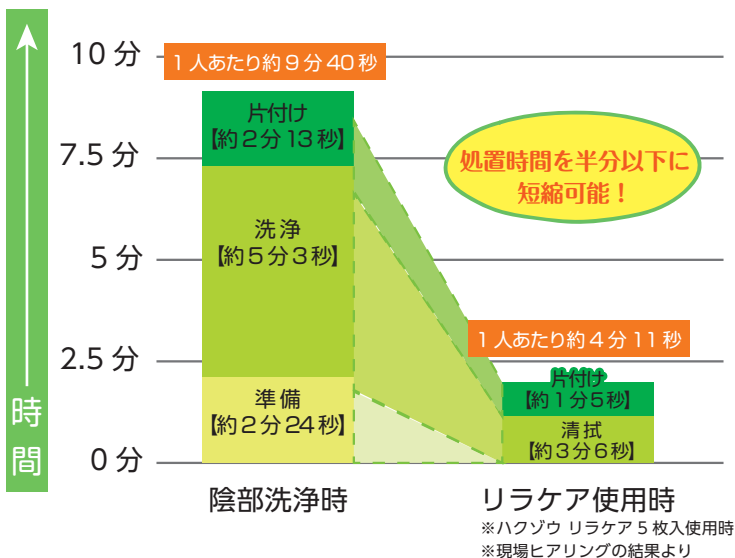

## 実際に使用された方のお声を集めました！

※ハクゾウ リラケア 5枚入使用时



処置時間が短くなることで、  
陰部洗浄時の羞恥心が低減された。



清潔感のあるオレンジの香りが心地良く、  
ケア中にリラックスできる。



お湯ではなく専用ウォーマーで温められるため、  
患者さんの好みの温度で清拭をすることができる。



水分がたっぷり含まれているから、こすらず  
やさしく拭ける！また、温めた後も冷めにくい。

## ハクゾウ リラケア<sup>®</sup> Lite の特長

### 化粧品

### 身体用清拭シート

日常ケアの際の身体清拭、失禁・便などの拭き取りに  
ご使用いただける清拭シートです。

#### 摩擦をおさえてやさしく清拭

水分量が多いため、清拭の際に摩擦が起きにくく、  
お肌にやさしく拭くことができます。また、  
オレンジオイル、洗浄成分を配合している  
ため、お肌を擦ることなく、汚れを浮かせて  
やさしく落とします。

#### お肌にやさしい処方設計

パラベンフリー、アルコールフリー、弱酸性。  
また、5種の保湿成分を配合しているので、  
拭きあがりがかしっとりします。

#### 皮脂汚れ除去に適したシート

皮脂汚れ除去に特化した杉綾柄の不織布を採用！  
シート表面の凸凹が皮脂の汚れをキャッチします。

#### 手軽に温められる

電子レンジや専用ウォーマーでカンタンに温めることが  
できます。(電子レンジでの加温目安：1袋 500W10秒)



#### 化粧水類

【販売名】ハクゾウリラケアライト  
【効能】皮膚を清浄にする。  
【内容量】不織布 150×300mm  
【全成分】水、PCA-Na、グリセリン、PG、ポリソルベート80、ポリクオ  
ニウム-51、オレンジ果皮油、ステアレス-20、グリセレス-26、  
ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカル  
バミン酸ヨウ化プロピニル、ポロキサマー181、クエン酸Na、クエン酸  
使用期限：製造日から2年

サッと取り出し  
すぐに使える♪



開け口が全て剥がせる  
ため、使い回し防止に  
なります。

品番	規格	入数	1梱入数	JANコード
2600260	150mm×300mm (3枚入)	35袋/箱	6箱/ケース	4 958286 084107



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマー課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 名古屋支店 ☎052-769-6021  
 三重営業所 ☎059-350-3844  
 京都営業所 ☎075-603-4826  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118