

医療現場で使われているサージカルマスクです。



ハクゾウ サージカルマスク

5
枚入

サイズ：17.5cm×9.5cm

せきエチケットなどに

三層構造で
ブロック!!

全国マスク工業会「マスク自主基準」適合
このマスクは全国マスク工業会の
「マスク自主基準」に適合しています。



日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスII 規格適合番号 M22210009						
適合番号発行元：JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア飛まつ捕集効率 VFE:ウイルス飛まつ捕集効率



マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

パッケージ	製品規格	
	品番	1780560
	規格	ホワイト
	包装	5枚入 / 袋
	1 梱入数	15袋 × 8箱
	JANコード	

※詳細は各営業にお問い合わせください。

マスク装着手順

1. ゴムひもが付いている側を顔に当ててください。
2. ノーズフィッターの入っている方を上側にし鼻と頬の形に合わせて手で曲げていきます。
3. ノーズフィッターから手を離さずゴムひもを左右の耳にかけていきます。
4. 最後に蛇腹を広げ、あごの下まで引っ張れば完了です。

使用上の注意

- 使用中にかゆみ、かぶれ・発疹などの異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的では使用しないでください。
- 肌に合わない時または装着部位に傷やはれもの等がある時は使用を中止してください。
- 使用中に臭いで気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。

保管上の注意

- 高温、湿度の高い場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318 | 阪神営業所 ☎078-262-1634 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 関東営業所 ☎03-5809-4780 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 高松駐在所 ☎087-813-7416 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |

