

環境除菌用ウエットクロス



Design Your Voice

Hakuzo

W ハクゾウ環境クロス ブロックNEO 大判

米国環境保護庁(EPA) 認定 第四級アンモニウム塩
含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。

中性



簡単!
ワンプッシュ
オープン



60枚入



30枚入



EPA
認定
第四級アンモニウム塩
含浸済



250枚
大判詰替用



250枚
大判容器入

使用用途

よく触れる環境表面の洗浄・除菌にご使用ください。

●テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなど ●汚染物の付着した箇所



テーブル



ドアノブ



ベッドまわり

サイズ 150mm×300mm
基 材 レーヨン不織布
成 分 第四級アンモニウム塩、水

ハクゾウメディカル株式会社

特長① 洗浄・除菌効果

米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた第四級アンモニウム塩が幅広い菌や汚染物の除去、除菌に効果を発揮します(すべての菌を除去または除菌するわけではありません。)


特長② 幅広い環境表面の洗浄に

中性の液剤となっており、金属やプラスチックへの影響が少なく、においほとんどありません。また、アルコールと比べ揮発性が低いので、1枚でも広範囲に清掃することができます。

特長③ 60枚入専用ホルダー

60枚入は専用ホルダーがあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。

ラック兼ホルダー
NEXTやベッドの
足元、ナースカートの
パイプ部分に設置
できます。

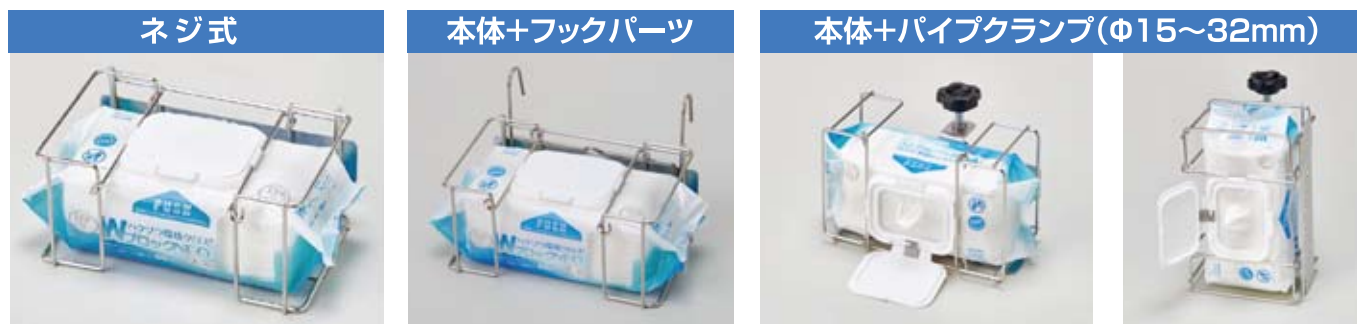

使用上の注意

- 機器類に使用する際は、機器付属の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 合成皮革を含むすべての革製品には使用しないでください。
- 環境表面の材質により、変質・変色などの影響を与えることがありますので、注意してご使用ください。
《特に注意が必要な箇所》
・プラスチック部分に対して負荷のかかる箇所、清拭後に液が溜まりやすい箇所(凹凸面、スイッチ、接合部など)は、亀裂を生じることがあります。
・コート類など可塑剤等の添加剤を含む軟質プラスチックは、変質・変色することがあります。
・ニスなどで塗装されている木製品などは、変質によってべたつきが生じることがあります。
- 手荒れ防止のため、プラスチック手袋等を着用してからご使用ください。
- 人体の清拭には使用しないでください。
- 使用後はしっかりフタを閉めてください。
- 詰め替える際は容器内側とフタを拭き取り、乾燥させてご使用ください。
- 開封後に長期間使用しなかった場合、クロスが変色することがありますが、使用上問題ありません。
- 小児や認知症の方の手の届かないところに保管してください。
- 高温・多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

品番	規格	包装	製品サイズ(mm)	1梱入数	ケースサイズ(mm)	JANコード
			製品重量(g)		ケース重量(kg)	
2600270	150×300mm	30枚/個	220×80×35	36個/ケース	360×260×240	4 958286 078397
			240		9.0	
2600271	150×300mm	60枚/個	220×80×80	18個/ケース	360×260×240	4 958286 078403
			440		8.5	
2600272	大判容器入 150×300mm	250枚/個	210×210×205	4個/ケース	475×470×215	4 958286 078410
			2,400		10.7	
2600273	大判詰替用 150×300mm	250枚/個	180×130×180	6個/ケース	545×270×200	4 958286 078427
			2,000		12.8	

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320