

環境除菌用ウエットクロス



Design Your Voice

Hakuzo

W ハクゾウ環境クロス ブロックNEO 大判

米国環境保護庁(EPA) 認定 第四級アンモニウム塩
含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。

中性



簡単!
ワンプッシュ
オープン



60枚入



30枚入



EPA
認定
第四級アンモニウム塩
含浸済



250枚
大判詰替用



250枚
大判容器入

使用用途

よく触れる環境表面の洗浄・除菌にご使用ください。

●テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなど ●汚染物の付着した箇所



テーブル



ドアノブ



ベッドまわり

サイズ 150mm×300mm
基 材 レーヨン不織布
成 分 第四級アンモニウム塩、水

ハクゾウメディカル株式会社

特長① 洗浄・除菌効果

米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた第四級アンモニウム塩が幅広い菌や汚染物の除去、除菌に効果を発揮します(すべての菌を除去または除菌するわけではありません。)


特長② 幅広い環境表面の洗浄に

中性の液剤となっており、金属やプラスチックへの影響が少なく、においほとんどありません。また、アルコールと比べ揮発性が低いので、1枚でも広範囲に清掃することができます。

特長③ 60枚入専用ホルダー

60枚入は専用ホルダーがあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。

ラック兼ホルダー
NEXTやベッドの
足元、ナースカートの
パイプ部分に設置
できます。

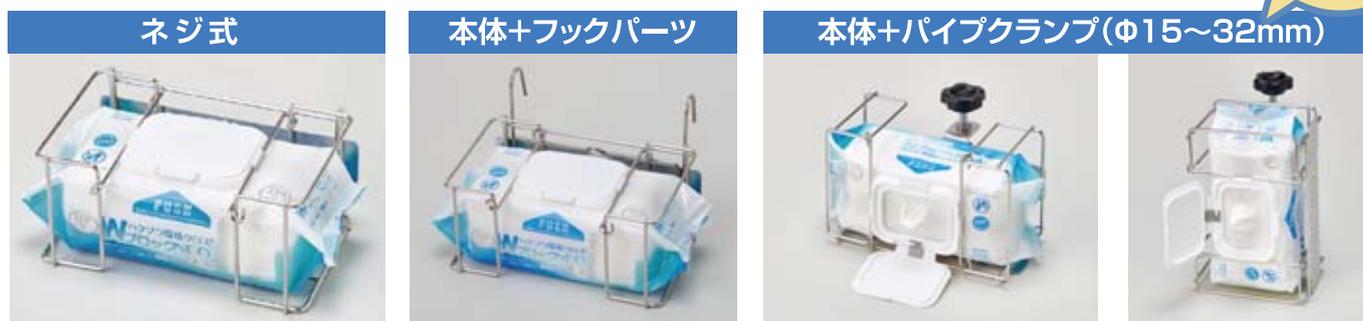

《テストピースによる試験結果》

○: 変化なし ×: 変化あり

当データは社内試験の結果となり、実際の素材ではございません。あくまで参考程度とお考えください。

- ※合成皮革を含むすべての革製品にはご使用いただくことができません。
- ※環境表面の材質により、変色することがあります。

種類	素材	影響の有無	種類	素材	影響の有無
金属	ステンレス	○	プラスチック	ポリカーボネート	○
	アルミ	○		ポリエチレンテレフタレート	○
	銅	×		ポリ塩化ビニル	○
	鉄	×(錆)		アクリル	○
	ゴム	NBR ゴム		○	ABS
ウレタン		○		ポリプロピレン	○
シリコン		○		ナイロン	○
ブチルゴム		○		エポキシ樹脂	○
EPDM		○		ポリエチレン	○

使用上の注意

- 水洗トイレには流さないでください。●開封後は取り出し口を閉め、なるべく早めにご使用ください。●目や粘膜に直接使用しないでください。●人体の清拭には使用しないでください。●体に異常が現れた時は、使用を中止してください。●合成皮革を含むすべての革製品にはご使用しないでください。●機械類などに使用する際は、その取扱説明書などで清掃方法をご確認の上で使用ください。不明な場合は、機器メーカーへお問い合わせください。●手荒れ防止のため、グローブを着用してからご使用ください。●250枚入容器に詰め替える際または1ヶ月に1回程度、容器の内側とフタの下部を洗浄し、容器とフタを乾燥させてください。●小児の手の届かないところに保管してください。●高温多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。●開封後に長期間使用しなかった場合、クロスが変色することがありますが、使用上問題ありません。

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
2600270	150×300mm	30枚/個	36個/ケース	4 958286 078397
2600271	150×300mm	60枚/個	18個/ケース	4 958286 078403
2600272	大判容器入 150×300mm	250枚/個	4個/ケース	4 958286 078410
2600273	大判詰替用 150×300mm	250枚/個	6個/ケース	4 958286 078427

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320