

そ の ま ま 使 え る

ジアワイプ1000

0.1w/v%次亜塩素酸ナトリウム液を含浸したウエットクロスです。



特 長

- 0.1w/v% (1,000ppm) に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
- 取り出してすぐに使用できます。
- 未開封の状態 で 2 年間濃度を保持します。
- 腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。

成 分

- 0.1w/v% (1,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウム

基 材

- 不織布
- 200 mm × 140 mm 50 枚

主な使用用途

- テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
- 環境整備用以外には使用しないでください。

使用上の注意

- 子供の手に触れないようにしてください。
- 指定用途以外には使用しないでください。
- 液が目に入ったらすぐに水で洗い、異常があれば眼科を受診してください。
- 衣類等につくと脱色するので注意してください。
- 使用する時はゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないようにしてください。
- 高温・多湿及び直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
- 金属を腐食させる場合があるので注意してください。
- 体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
- 水洗トイレに流さないでください。

塩素系	まぜるな危険	注意	● 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜると)有害な塩素ガスが出て危険。
	● 換気をよくして使用する。 ● お子さまの手にふれないようにする。 ● 液が目に入ったら、すぐに水で洗う。		

品 番	規 格	包 装	1 梱 入 数	JANコード
3162266	200×140mm	50 枚入	50 個	4 958286 717999

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎ 06-6809-4318 阪神営業所 ☎ 078-262-1634
 東京支店 ☎ 03-3522-6720 神戸営業所 ☎ 078-940-8975
 北大阪支店 ☎ 072-653-4045 広島営業所 ☎ 082-849-4188
 南大阪支店 ☎ 0721-20-2900 福岡営業所 ☎ 092-481-5921
 仙台営業所 ☎ 022-393-7434 熊本営業所 ☎ 096-345-2253
 関東営業所 ☎ 03-5809-4780 札幌駐在所 ☎ 011-788-8009
 西東京営業所 ☎ 042-646-0451 北陸駐在所 ☎ 076-225-8013
 名古屋支店 ☎ 052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎ 099-296-1925
 三重営業所 ☎ 059-350-3844 沖縄駐在所 ☎ 098-941-5320
 京都営業所 ☎ 075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎ 06-6943-6118