

CVC(中心静脈カテーテル)挿入時に必要とされる部材をセットしEOG滅菌したものです。



※写真の構成品は定番品と異なります。
ご用命の際は、構成品をご指定若しくはお問い合わせ願います。



トレイタイプ



滅菌バッグタイプ

- 感染リスクが高いとされるCVCにおいて、リスクの低減につながります。
- 構成内容をご相談を承ります。
- マスクとキャップ以外は滅菌ラップに包装していますので、無菌的に取り出すことができます。

※本製品は受注生産品です。

主な構成部材

- キャップ
- マスク
- アイソレーションガウン
- 穴あきドレープ
- 救急絆創膏

MBPセット操作手順例

STEP.1 マスク・キャップの装着



バックを開封し、封入物を取り出し安定した台の上に置く。



マスク装着

キャップ装着

STEP.2 滅菌ラップの展開



擦込式アルコール消毒剤による手指消毒。



滅菌ラップを展開する



展開後、再度手指消毒

STEP.3 アイソレーションガウン・手袋の着用



アイソレーションガウンを取り出す。



ガウンを広げ着用し、首と腰の紐を結び。



滅菌手袋を着用する(※)



STEP.4 ドレープを展開



ドレープの○穴が下に向くように持つ。



○穴を穿刺部に合わせ、皮膚面に置く。



ドレープを展開する。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
三重営業所 ☎059-350-3844 札幌駐在所 ☎011-788-8009
京都営業所 ☎075-603-4826